

esthetic-gum

Transparentes A-Silikon

Materialbeschreibung

esthetic-gum ist ein transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von durchsichtigen Vorwällen für die Verarbeitung von lichtpolymerisierenden Materialien.

Mischzeit: entfällt (Kartuschensystem)

Verarbeitungszeit: 60 Sek. (bei 23°C)

Entformbarkeit: 120 Sek.

Endhärte: 75 Shore

Verarbeitung

esthetic-gum wird im Doppelkartuschensystem angeboten, um eine ideale Mischung der Komponenten 1:1 zu erreichen. **esthetic-gum** mit Hilfe des Injektors direkt aus der Mischkanüle auf die gewünschte Stelle aufbringen. Mischkanülen im Material eingetaucht lassen, um das Eindringen von Luftblasen zu vermeiden. Bei Gipsmodellen die zu bearbeitenden Stellen kurz mit Isolierung Gips : Kunststoff einpinseln (einziehen lassen und trocken blasen) um optimale Oberflächen zu erreichen.

Produktentwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit
ZTM Peter Schaller esthetic-concept München

Lieferform

esthetic-gum, transparent 2x50 ml Doppelkartusche inkl. 12 Mischkanülen
esthetic-gum, transparent 8x50 ml Doppelkartusche
esthetic-gum Nachfüllpackung Mischkanülen 40 Stück