

picodent Gipslöser

Gipslöser mit verstärkter Lösekraft

Anwendungsgebiete

- Anrührbecher
- Kunststoffprothesen
- Abdrucklöffel
- Güsse (gipsgebundene Einbettmasse)
- Lösen von Resten von Dentalgipsen, Kunststoffprothesen und gipsgebundenen Einbettmassen
- auch an schwerzugänglichen Stellen.

Anwendung

Die zu reinigende Gegenstände in den unverdünnten Gipslöser legen.
Ultraschall und Temperierung des Bades auf ca. 40° - 50° C beschleunigen den Lösevorgang des Gipses.

Reinigungsdauer

ca. 20 - 80 Minuten

Nach der Entnahme aus dem Bad mit Wasser abspülen.
Die Wirkung ist während des Reinigungsvorganges an der Bläschenbildung zu beobachten.

1.000 ml lösen ca. 100 g Gips vollständig auf.