

Isoliermittel Gips gegen Kunststoff

Auf Alginat-Basis

Material

picodent Isoliermittel G:K dient zur Isolierung von Prothesenkunststoff gegen Gips. Zieht sehr gut in den Gips ein und verhindert dadurch eine Haut-, Schichtenbildung.

Verarbeitung

1. Modelle oder Vorwalle aus Gips in warmen Wasser 2-3 Min. grundlich wassern. Es durfen keine Luftblasen mehr aus dem Wasser aufsteigen.
2. Die Isolierflussigkeit wird zweimal dunn mit einem weichen Pinsel auf die gewasserten Gipsteile aufgetragen. In Rillen und Furchen darf kein Isoliermittel zuruckbleiben. Uberschussiges Isoliermittel abstreifen. Klammern und Kunststoffzahne sollen nicht benetzt werden.
3. Isolierfilm gut trocknen lassen. Gut isolierte Teile erkennt man an der speckig glanzenden Oberflache. Nicht glanzende Teile sind noch mal zu isolieren.

Wichtig, zur Beachtung

Auf den zu isolierenden Gipsoberflachen darf sich kein Wachs, Fett oder Trennmittel befinden. Der Isolierfilm halt sonst nicht oder kann reien. Es empfiehlt sich, solche Gipsteile grundlich auszubruhlen. Flasche nach Anbruch, unbedingt im Kuhlschrank lagern!!! Auf gar keinen Fall den Pinsel in die Flasche tauchen immer in kleinen Portionen in einem Behalter abfullen.

Lagerstabilitat

picodent Isoliermittel G:K kann in kuhlen / dunklen / frostfreien Raumen mindestens 12 Monate gelagert werden, sollte aber nach Anbruch der Flasche innerhalb von 2 Monaten aufgebraucht werden.

- Nach Anbruch, unbedingt im Kuhlschrank lagern!!!