

picodent "SPEED-Muffel"

Metallringfreies Einbettssystem

Das picodent-Einbettssystem gilt als erste Wahl im Bereich des Edelmetalldentalgusses. Höchste Präzision und enorme Kostenersparnis zeichnen es aus. Gegenüber herkömmlichen Metallringen findet ein absolut einzigartiges, dauerhaftes, expansions-nachgiebiges und durchsichtiges Material Anwendung.

Das bewährte System besteht aus einem Gußtrichterformer und einem konischen Ring, welche nur mehr zur Formung der Einbettmasse, nicht aber zum Gießen selbst dienen.

Die Vorteile des picodent-Einbettsystems

- optimale Expansion, die Einbettmasse kann sich im Gegensatz zum Metallring ungehindert dreidimensional ausdehnen, wodurch eine Expansion nach innen bzw. eine Verkleinerung des Gußhohlraumes verhindert wird.
- bis zu 50% Kostenersparnis (verschleißfreies Material, kein ständiger Zukauf von Metallmuffelringen mehr, kein Muffelvlies notwendig)
- superleichtes Ausbetten
- viele verschiedene Größen (2/3/6)
- einfach zu reinigen - nur mit Wasser abspülen
- geringerer Verschleiß der Öfen durch eliminierte Zunderbildung

Verarbeitungshinweise

Das picodent-Einbettssystem eignet sich für alle phosphatgebundenen Einbettmassen. Beim Einbetten ist ein Abstand zwischen Wachsobjekt und Muffelring von mindestens 5 Millimetern einzuhalten. 15-20 Minuten nach dem Einbetten wird die erhärtete Muffel dem Muffelformer entnommen.