

picodent Stabimed

Aldehyd- und phenolfreies Konzentrat zur Instrumentendesinfektion

Das neue Instrumentendesinfektionsmittel mit außergewöhnlicher Reinigungskraft

Eigenschaften

- aldehyd- und phenolfrei
- schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem Instrumentarium, flexiblen und starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Laborgeräten und anderen thermolabilen Materialien
- breites Wirkungsspektrum
- besonders niedrige Anwendungskonzentration
- gute Materialverträglichkeit
- im Ultraschallbad einsetzbar
- außergewöhnliche Reinigungskraft, verbunden mit optimalem Blut- und Sekret-Lösevermögen

Anwendung

Über die Dosierung wird die Einwirkzeit gesteuert.

Behälter mit der vorgesehenen Wassermenge (nicht über 25°C Wassertemperatur) füllen und die entsprechende Menge picodent Stabimed zugeben.

Wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration

Empfehlung Konzentrat:	Einwirkzeit:
20 ml auf 1 Liter Wasser	15 Minuten
15 ml auf 1 Liter Wasser	30 Minuten

Die Instrumente nach Anleitung desinfizieren, gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

Beim Umgang mit der Desinfektion sind auf der Verpackung angegebenen Hinweise zu beachten.

picodent Instrumentendesinfektion ist nach Kriterien der DGHM geprüft und gelistet. Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmittel das Tragen von Schutzhandschuhen vor.

Sicherheitshinweis bitte laut Etikett beachten!