

Abnehmbare, starre Zahnfleischmaske mit picopoly nach  
ZTM Rainer Semsch/Malek Misrabi



Abdruck mit  
Modellimplantaten



Ausblocken mit Wachs und  
Trinkhalmen



Abformung isolieren und mit  
Softknete ausblocken



Danach mit picopoly  
ausgießen und aushärten  
lassen



Trinkhalme entfernen



Konisch beschleifen und  
Bohrlöcher für Pins setzen



Zwischenkontrolle



Pins einkleben und Spalt  
zwischen Modellanalag und  
Maske mit Wachs verschließen



Die Abformung dann wie gewohnt  
mit Gips ausgießen, Vollmodell  
entformen und trimmen



Fertiges Modell mit starrer  
Zahnfleischmaske



Starre, abnehmbare  
Zahnfleischmaske



Abgenommene, starre  
Zahnfleischmaske mit Pins

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0