

# twinsil speed

## additionsvernetzendes Dubliersilikon - schnellabbindend

für die Zahntechnik

Eigenschaften: sehr dünnfließend, schnelle Entformbarkeit (12-15 Minuten), sedimentationsfrei

Shorehärte A nach 30 Min.: 21  
Shorehärte A nach 24 Std.: 22

### Gebrauchsanweisung

**Dosierung:** 1 Teil A blau (Katalysator) 1 Teil B gelb (Basis)

**Mischzeit manuell:** 60 Sekunden

**Mischzeit unter Vakuum:** 45 Sekunden

**Verarbeitungszeit:** 4 Minuten (bei 23°C)

**Entformbar nach:** 12-15 Minuten (bei 23°C)

**Lagerung:** In der Originalverpackung nicht über 25°C max. 24 Monate

**Lieferform:** Flasche – 1 kg A + 1 kg B  
Kanister – 5 kg A + 5 kg B

### Arbeits- und Sicherheitshinweis

Die Verarbeitung in Silikonmischgeräten ist nach Reinigung des Gerätes (spülen mit Silikonöl) oder Test der Komponentenverträglichkeit problemlos möglich. Behälter nach Entnahme sorgfältig verschließen. Achtung: Deckel nicht vertauschen! Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig sind.