

# Abformung + Modell als Grundlage für passgenauen Zahnersatz

Materialklasse:	Vorbereitung:		Liegezeiten:		Gips:		Kontrollmodell	Besonderheiten der einzelnen Praxen !!!				
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Desinfektion</b></li> <li> <b>Entspannen</b></li> <li> <b>Trocknen !!!</b></li> </ul>	<b>! Achtung !</b>	* Nach Abformzeitpunkt in der Praxis / Abformnahme des Zahnarztes *		<b>Frühestens Ausgießen</b>	<b>Aufbewahrungszeitraum</b>		<b>Dosierung:</b> auf <b>100g Gips</b> wird folgende Wassermenge gegeben:  <b>Farben</b> der verwendeten Gipse im Labor selbständig eintragen	<b>Dosierung !</b>  in ml	<b>Alginate + Polyäther:</b> die Praxen nach Farbe des verwendeten Abformmaterials in die jeweilige Spalte schreiben  <b>A- + C- Silikone:</b> Praxisname in die linke und die Farbe des verwendeten Abformmaterials in die rechte Spalte schreiben		
<b>Alginate:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Desinfektion:</b> ja 1 min tauchen, 9 min einwirken</li> <li> <b>Entspannen:</b> nein</li> <li> <b>Trocknen:</b> ja vorsichtig mit Druckluft</li> </ul>		Nach Desinfektion + vorm Entspannen Gipspulver (Trimmerwasser) einstreuen – 2 Minuten einwirken !	<b>So schnell wie möglich !!</b>	<b>Lagerung nicht möglich !!</b>	<u>Typ 3:</u> * N 100 ..... 30 * pico-crema soft ..... 30 <u>Typ 4:</u> * hydro-plaster ..... 23-24 * U 180 ..... 23 * pico-stone M ..... 21-22 * pico-stone speed ..... 25 <u>Typ 5:</u> * prothetik-stone ..... 22-23	<b>Farbe:</b>	<b>nicht möglich !</b>  Beim zweiten Ausgießen keine Dimensionstreue vorhanden		weiß	rosa	orange
<b>Polyäther:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Desinfektion:</b> ja 1 min tauchen, 9 min einwirken Keine Sprühdeseinfektion</li> <li> <b>Entspannen:</b> nein Dünnere Wasserfilm als Gleitfilm ausreichend</li> <li> <b>Trocknen:</b> nein</li> </ul>	<b>Nach 1-2 Stunden ausgießen !!!</b>		<b>!! 7 Tage !!</b>	Trocken und lichtgeschützt nicht über 25 Grad lagern	<u>Typ 4:</u>  <u>Superhartgipse</u>	<b>Farbe:</b>		<b>Kontrollmodell möglich - 1 Stunde nach Abziehen des Zahnkranzes !</b>  Herausgerissene Bereiche berücksichtigen	Impregum		Permadyne
<b>A - Silikone:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Desinfektion:</b> ja</li> <li> <b>Entspannen:</b> ja Ausnahmen mit * kennzeichnen - Keine alkoholhaltigen Mittel - Mittel auf Tensidbasis ideal</li> <li> <b>Trocknen:</b> ja vorsichtig mit Druckluft</li> </ul>	<b>Nach 2-3 Stunden ausgießen !!!</b>		<b>Ca. ½ Jahr !!</b>	Lagerstabil bei Raumtemperatur	* hydro-plaster ..... 23-24 * U 180 ..... 23 * pico-stone M ..... 21-22 * pico-stone speed ..... 25  <u>Stumpfgipse</u>  * Implantat-rock ..... 20-21 * camtec-rock ..... 20 * Z 260 v ..... 18-20 * quadro-rock plus ..... 19-20 * zeiser-rock ..... 20 * quadro-rock ..... 20-21 * pico-rock 280 ..... 20	<b>Farbe:</b>	<b>Kontrollmodell möglich - 1 Stunde nach Abziehen des Zahnkranzes !</b>  Zu starke Stauchungen vermeiden		Praxis	Farbe	Praxis
<b>C - Silikone:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Desinfektion:</b> ja</li> <li> <b>Entspannen:</b> ja - Keine alkoholhaltigen Mittel - Mittel auf Tensidbasis ideal</li> <li> <b>Trocknen:</b> ja vorsichtig mit Druckluft</li> </ul>	<b>Nach 3 Stunden ausgießen !!!</b>		<b>Bis zu 7 Stunden !</b>	Max. 24 Stunden mit geringer Schrumpfung der Abformung		<b>Farbe:</b>		<b>Kontrollmodell möglich - 1 Stunde nach Abziehen des Zahnkranzes !</b>  Schlechteste Rückstellung nach Stauchung	Praxis	Farbe	Praxis