

# esthetic-gum

## Silicone trasparente

### Descrizione

esthetic-gum è un silicone per addizione ideale per la fabbricazione di mascherine trasparenti per la lavorazione di materiali fotopolimerizzabili.

### Lavorazione

**Tempo di lavorazione** 60 secondi (a 23°C)

**Indurimento** 120 secondi

**Durezza** 75

Il silicone esthetic-gum viene offerto nel sistema a doppia cartuccia per raggiungere una miscelazione ideale 1:1.  
Applicare con l'aiuto dell'iniettore direttamente nella cannula di miscelazione sulla parte desiderata. Lasciare immersa la cannula nel materiale in modo che non entri aria.  
In caso di modelli in gesso, applicare uno strato di isolante gesso-resina sulla parte da trattare (fare assorbire ed asciugare), in modo da ottenere una superficie ideale.

### Disponibilità

esthetic-gum	2 x 50 cartucce doppie (incluse 12 cannule di miscelazione)
esthetic-gum	8 x 50 cartucce doppie
esthetic-gum	confezione di ricarica cannule di miscelazione (40/pz)

Rev. 2011-04