

Hinweis

Majesthetik®-Gingiva scan erzielt sehr gute Ergebnisse mit folgenden Scannertypen:

- Smart optik Vinyl
- inEos®
- Dental Wings® Scan
- 3Shape®-Scanner
- Cercon® eye
- Cercon® brain
- NobelProcera™

(Eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer).

Aushärtezeiten

Majesthetik® Gingiva	10 - 15 Minuten
Majesthetik® Gingiimplant	10 - 15 Minuten
Majesthetik® Gingiva scan	7 - 8 Minuten

Liefereinheiten

Majesthetik® Gingiva	2 x 50 ml Doppelkartuschen inkl. 12 Mischkanülen
Majesthetik® Gingiva Nachfüllpack	8 x 50 ml Doppelkartuschen
Majesthetik® Gingiimplant	2 x 50 ml Doppelkartuschen inkl. 12 Mischkanülen
Majesthetik® Gingiimplant Nachfüllpack	8 x 50 ml Doppelkartuschen
Majesthetik® Gingiva scan	2 x 50 ml Doppelkartuschen inkl. 12 Mischkanülen
Nachfüllpack Mischkanülen	für alle Majesthetik®-Zahn- fleischmasken, 40 Stück

Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern (abzurufen unter www.picodent.de)

Hotline

Bei Fragen rund um das Thema Majesthetik®-Zahnfleischmasken steht Ihnen das Team von Da Vinci Dentallabor GmbH unter der Telefonnummer +49 2225 10027 gerne zur Verfügung.



Da Vinci Dentallabor GmbH
Glockengasse 3
53340 Meckenheim

Telefon +49 2225 10027
Fax +49 2225 10116
Internet www.davincidental.de
E-Mail leonardo@davincidental.de



Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

Telefon +49 2267 6580-0
Fax +49 2267 6580-30
Internet www.picodent.de
E-Mail picodent@picodent.de

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Legende

LOT	Chargenbezeichnung		Empfohlene Lagertemperatur
	Verwendbar bis		Vor Licht schützen
	Gebrauchsinfo beachten		Vor Nässe schützen

Da Vinci's

Majesthetik®

Line



Gebrauchsinformationen

Majesthetik®

Zahnfleischmasken

Beschreibung

Majesthetik®-Zahnfleischmasken sind additionsvernetzende Vinyl-Polysiloxane und dienen zur Herstellung von laborgefertigten Zahnfleischmasken zur exakten Wiedergabe des Gingivaverlaufs auf dem Meistermodell.

Je nach Anwendung stehen folgende Zahnfleischmasken zur Verfügung:

Majesthetik® Gingiva Farbe 	bei der Herstellung von Kronen und Brücken (Shorehärte 62)
Majesthetik® Gingiimplant Farbe 	speziell für die Implantattechnik (Shorehärte 70)
Majesthetik® Gingiva scan Farbe 	optimiert für die digitale Datenerfassung (Shorehärte 70)

Mischkanülen

Zur Applikation wird ausschließlich die **Mischkanüle für alle Majesthetik®-Zahnfleischmasken** (Art.-Nr.15505040) verwendet. Sie gewährleistet eine homogene Mischung und materialsparende Anwendung.

Dosierung

Die Kartusche in den 1:1-Injektor einlegen, Verschlusskappe entfernen und bei Erstgebrauch Material so lange auspressen, bis aus beiden Öffnungen gleichmäßig Material fließt.

Setzen Sie nun die Mischkanüle auf die Austrittsöffnungen, achten Sie auf korrekten Sitz. Zum Verschluss drehen Sie die Mischkanüle um 90 ° im Uhrzeigersinn.

Betätigen Sie den Injektor erneut und bringen Sie Material in gewünschter Menge aus.

Die gebrauchte Mischkanüle bleibt auf der Kartusche und dient als Verschluss.

Vor der nächsten Anwendung gebrauchte Mischkanüle entfernen, Austrittsöffnungen auf eine in sehr seltenen Fällen entstandene Pfropfenbildung kontrollieren, ggf. säubern und wie gewohnt fortfahren.

Verarbeitung

Alle **Majesthetik®-Zahnfleischmasken** können sowohl im indirekten als auch direkten Verfahren verarbeitet werden:

Indirekter Herstellungsablauf



1. Vorwall erstellen mit **picodent® twinduo** oder **picodent twingum®**.



2. Ausdehnung der Zahnfleischmaske anzeichnen und Zahnkranz unter Einarbeitung von Unterschnitten beschleifen.



3. Isolierung des Vorwalls und des Modells mit **Majesthetik® Separator**.



4. Zahnfleischmaske in Vorwall und Modell einspritzen.



5. Vorwall unter leichtem Druck auf das Modell reponieren und aushärten lassen.



6. Vorwall abziehen und Überschüsse durch Rubbeln oder Abwaschen entfernen.



7. Weiterbearbeiten durch Fräsen oder Beschneiden bis zum gewünschten Endresultat.

Direkter Herstellungsablauf



1. Die desinfizierte Abformung im relevanten Bereich mit **Majesthetik® Separator** isolieren und 5 Min. trocknen lassen.

Wichtiger Hinweis: Polyether-Abformmaterialien können die Aushärtung der Zahnfleischmaske negativ beeinflussen. Polyether-Abformungen sollten mindestens 3 Stunden ablüften.



2. Anschließend **Majesthetik®-Zahnfleischmaske** direkt in den relevanten Bereich der Abformung spritzen und ca. 8 Minuten aushärten lassen.



3. Die Abformung mit Dentalgips (**picodent Implantat-rock®**) ausgießen und Modell erstellen wie gewohnt.



4. Nach Aushärtung die Abformung vom Modell vorsichtig lösen. Pressfahnen sowie Überschüsse mit Skalpell oder rotierenden Instrumenten entfernen. Die Zahnfleischmaske kann nun vom Modell entfernt und wieder reponiert werden.