


# DaVinci's *Majesthetik*<sup>®</sup> - *Stumpfix*<sup>®</sup>


## Separator

 Liquid zur Isolierung von **Majesthetik**<sup>®</sup>-**Stumpfix**<sup>®</sup> in Verbindung mit Metallkronen und Frässtümpfen.

**Anwendung:** Bei Bedarf untersichgehende Bereiche wie gewohnt mit Wachs ausblocken. Danach den Separator hauchdünn auftragen und Überschüsse vorsichtig mit Druckluft entfernen.

 Liquide pour l'isolation de **Majesthetik**<sup>®</sup>-**Stumpfix**<sup>®</sup> en liaison avec du couronnes métalliques et les moignons fraisés.

**Utilisation:** en cas de besoin, combler les parties en retrait avec de la cire comme habituellement. Appliquer ensuite une fine pellicule de séparateur et éliminer soigneusement l'excédent à l'air comprimé.

 Liquido per l'isolamento di **Majesthetik**<sup>®</sup>-**Stumpfix**<sup>®</sup> in combinazione con corone in metallo e i monconi fresati.

**Modalità d'impiego:** in caso di necessità, isolare con cera, come di consueto, le zone irregolari. Dopodiché, applicare uno strato sottilissimo di separatore e rimuovere con cura la quantità in eccesso con aria compressa.

 Liquid to insulate **Majesthetik**<sup>®</sup>-**Stumpfix**<sup>®</sup> in association with metal crowns and milled stumps.

**Application:** if necessary, block up any undercuts with wax as usual. Then apply an extremely thin layer of the dental separator and carefully remove any excess with compressed air.



Da Vinci Dental Ludwig  
& Trombin GbR  
Glockengasse 3  
53340 Meckenheim  
Telefon 02225 10027  
Fax 02225 10116  
[www.davincidental.de](http://www.davincidental.de)  
[leonardo@davincidental.de](mailto:leonardo@davincidental.de)



picodent<sup>®</sup> GmbH  
Lüdenschneider Str. 24-26  
51688 Wipperfürth  
Tel. 02267 6580-0  
Fax 02267 658030  
[www.picodent.de](http://www.picodent.de)  
[picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)