

pico fix-tray Modellsystem



pico fix-tray Modellsystem

**schnell, hochpräzise und
wiederverwendbar**



pico fix-tray Modellsystem

Gebrauchsanweisung



1. Beschneiden der Abformung im palatinalen Bereich, um ein flaches Modell zu erhalten. Danach die Modellmitte anzeichnen.



2. Abformung mit Entspannungsmittel (z.B. easyflow, picodent) benetzen.



3. Pinbasisplatte und Pins mit speziellem pico fix-tray Isolierspray dünn isolieren, Überschuss vorsichtig mit Druckluft entfernen.



4. WICHTIG! Vorsichtig die Isolierung von der Außenfläche abwischen. Restliche Isolierung trocknen lassen.



5. Manschette aufsetzen und die Pinbasisplatte mit Superhartgips (z.B. pico-rock® 280, picodent) befüllen, bis die Pins vollständig bedeckt sind.



6. Abformung vollständig mit Superhartgips ausgießen.



7. Die Abformung aufsetzen und die Modellmitte ausrichten. Die Kauebene soll möglichst parallel zur Pinbasisplatte ausgerichtet werden. Überschüssigen Gips entfernen.



8. Nach dem Aushärten des Gipses, die Manschette entfernen.



9. Die Sekundärplatte abnehmen. Mittels Abhebevorrichtung den Zahnkranz vorsichtig ohne diesen zu verkanten abheben.



10. Die Pinbasisplatte mit dem pico fix-tray Reinigungsspray einsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.



11. Die Pinbasisplatte abdampfen und gründlich reinigen.



12. Den Zahnkranz trimmen ohne die Retentionsflächen auf der Innenseite zu beschädigen. Danach mit feinem Schleifband weiter bearbeiten.



13. Die Flächen können dann mit einem Gummipolierer perfekt geglättet werden.



14. Pinbasisplatte und Bohrungen auf Fremdkörper überprüfen und Zahnkranz aufsetzen.



15. Eventuell vorhandenen Gipsstaub mit einem Borstenpinsel entfernen.



16. Das Modell ist nun zum Sägen bereit.



picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

Telefon +49 2267 6580-0
Internet www.picodent.de
E-Mail picodent@picodent.de



qualität



verantwortung



sicherheit



innovation