

## picodent® Modellsystem



picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH Lüdenscheider Str. 24-26 51688 Wipperfürth

 Telefon
 +49 2267 6580-0

 Fax
 +49 2267 6580-30

 Internet
 www.picodent.de

 E-Mail
 picodent@picodent.de





## Att Modellsystem

Abgestimmtes System, höchste Präzision und einfache Verarbeitung

















## Gebrauchsanweisung



1. pillar-pin (Pfeiler-Pin)



2. smart-pin + Hülse



pico-rock 280 für den Zahnkranz verwenden



 picocryl Sekundenkleber, dünnfließend und superschnell



 Den Zahnkranz mit picodent sockelsep isolieren, Überschüsse vorsichtig abblasen



12. Zum Sockeln picodent suppen-sockler (G) "Das Original" verwenden



4. Die Zahnkranzunterseite mit Schleifpapier (K800) glätten



5. Die Bohrlöcher mit einem farbigen Stift markieren



6. Der picodent pinbohrer ist für alle Pinbohrgeräte verwendbar



13. Abgestimmtes System (picodent Formplatten) zur Herstellung des Primärsockels



 Hochwertiges Zubehör, u.a. picolino extra flache Magnettöpfe



15. Die Umkehrformplatte spart Ihnen Zeit und Geld



7. Ein Bohrloch für den pillarpin, zwei für den smart-pin

· War



8. Den pillar-pin ohne Kleber eindrücken



9. Den smart-pin mit picocryl Sekundenkleber einkleben



 Das Sägen der Modelle erfolgt vorsichtig mit der Trennscheibe



17. Der pillar-pin verbleibt nach dem Abheben der Stümpfe im Sockel



 Und sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit