

# picodent "SPEED-Muffel"

## Metallringfreies Einbettssystem

Das picodent-Einbettssystem gilt als erste Wahl im Bereich des Edelmetalldentalgusses. Höchste Präzision und enorme Kostenersparnis zeichnen es aus. Gegenüber herkömmlichen Metallringen findet ein absolut einzigartiges, dauerhaftes, expansions-nachgiebiges und durchsichtiges Material Anwendung.

Das bewährte System besteht aus einem Gußtrichterformer und einem konischen Ring, welche nur mehr zur Formung der Einbettmasse, nicht aber zum Gießen selbst dienen.

### Die Vorteile des picodent-Einbettsystems

- optimale Expansion, die Einbettmasse kann sich im Gegensatz zum Metallring ungehindert dreidimensional ausdehnen, wodurch eine Expansion nach innen bzw. eine Verkleinerung des Gußhohlraumes verhindert wird.
- bis zu 50% Kostenersparnis (verschleißfreies Material, kein ständiger Zukauf von Metallmuffelringen mehr, kein Muffelvlies notwendig)
- superleichtes Ausbetten
- viele verschiedene Größen (2/3/6)
- einfach zu reinigen - nur mit Wasser abspülen
- geringerer Verschleiß der Öfen durch eliminierte Zunderbildung

### Verarbeitungshinweise

Das picodent-Einbettssystem eignet sich für alle phosphatgebundenen Einbettmassen. Beim Einbetten ist ein Abstand zwischen Wachsobjekt und Muffelring von mindestens 5 Millimetern einzuhalten. 15-20 Minuten nach dem Einbetten wird die erhärtete Muffel dem Muffelformer entnommen.