

**Abnehmbare, starre Zahnfleischmaske mit picopoly nach  
 ZTM Rainer Semsch/Malek Misrabi**



Abdruck mit  
 Modellimplantaten



Ausblocken mit Wachs und  
 Trinkhalmen



Abformung isolieren und mit  
 Softknete ausblocken



Danach mit picopoly  
 ausgießen und aushärten  
 lassen



Trinkhalme entfernen



Konisch beschleifen und  
 Bohrlöcher für Pins setzen



Zwischenkontrolle



Pins einkleben und Spalt  
 zwischen Modell analog und  
 Maske mit Wachs verschließen



Die Abformung dann wie gewohnt  
 mit Gips ausgießen, Vollmodell  
 entformen und trimmen



Fertiges Modell mit starrer  
 Zahnfleischmaske



Starre, abnehmbare  
 Zahnfleischmaske



Abgenommene, starre  
 Zahnfleischmaske mit Pins