

twinsil extrahart

Silicone da duplicazione per addizione

Durezza shore dopo 30 minuti 31
Durezza shore dopo 24 ore 32

Dossaggio

Una parte di componente A bianco
Una parte di componente B verde

Lavorazione

Miscelazione manuale 60 secondi
Miscelazione sottovuoto 45 secondi
Lavorazione 5-6 minuti (a 23°C)
Pronto dopo 30 minuti (a 23°C)

Conservazione in deposito

Conservare nell'imballo originale
La temperatura non deve superare i 25°C per un massimo di 24 mesi

Istruzioni di lavorazione e di sicurezza

- Chiudere bene il contenitore subito dopo l'utilizzo
- Non scambiare i coperchi
- Evitare il contatto con gli occhi, se dovesse succedere, lavare gli occhi immediatamente con acqua corrente e consultare l'oculista.
- Evitare il contatto con i vestiti, possono rovinarsi.

Disponibilita'

Bottiglia da 1 kg A + 1 kg B
Canistra da 5 kg A + 5 kg B