


# CATALOGO 2026

prodotti classici

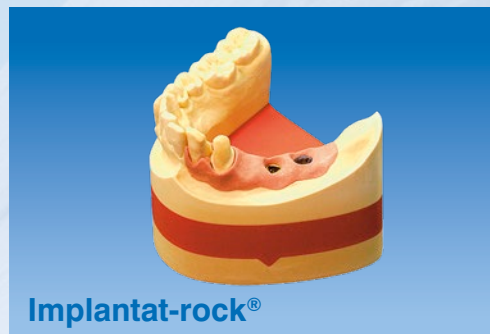

# ASSISTENZA

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Telefono | 0464 - 518580                                                          |
| Fax      | 0464 - 515189                                                          |
| E-Mail   | <a href="mailto:picodentitalia@gmail.com">picodentitalia@gmail.com</a> |
| Internet | <a href="http://www.picodent.de">www.picodent.de</a>                   |

- Istruzioni individuali per la lavorazione dei gessi
- Imballaggio a tutela dell'ambiente
- Hotline per gessi
- Hotline per rivestimenti
- Vasta gamma di colori per gessi
- Colori individuali
- Corso sullo sviluppo dei modelli: "Il modello nella protesi su impianti, considerazioni per il successo"
- Corso sullo sviluppo dei modelli: "Il modello perfetto nella protesi su impianti e il portaimpronta individuale"
- Corso sullo sviluppo dei modelli: "Il modello: il biglietto da visita del laboratorio"
- Corso sullo sviluppo dei modelli: Corso pratico "Sistema per modelli zeiser®"
- Corso sullo sviluppo dei modelli: "L'impronta: la base per una protesi perfetta"
- Corsi individuali sullo sviluppo dei modelli nel vostro laboratorio



# INDICE

## Gessi Speciali

Pagine 4 - 14

gessi per monconi  
gessi extra duri  
gessi per zoccolatura  
gessi per articolatori  
gessi duri  
gessi per riparazioni  
info sulla gamma dei colori

## Sistema per modelli picodent®

Pagine 15 - 19

sistema per modelli ArtOral  
pins e guaine  
basi, anelli in gomma  
zoccolatori  
calamite, contenitori per magneti, piastrine metalliche

## Sistema per modelli zeiser®

Pagine 20 - 24

zeiser®-foragessi  
zeiser®-piastra  
zeiser®-placca snap-on  
zeiser®-Combisil  
zeiser®-perni  
zeiser®-altri accessori

## Majesthetik®-Line

Pagine 25 - 28

mascherina gengivale  
iniettore  
polvere per tessitura  
lacca per monconi fotopolimerizzabile  
vernice per gesso  
isolante

## Altri prodotti

per la realizzazione del modello

Pagine 29 - 32

materiale per monconcini  
scanspray  
riduttore di tensioni per tutte le superfici dei materiali da impronta  
isolante  
solvente per gessi  
pulizia porta impronte  
flocculante  
silicone di fissaggio

## pico-line

Materiali fotopolimerizzabili

Pagine 33 - 36

resina fotopolimerizzabile  
resina per bloccaggio fotopolimerizzabile  
separatore  
materiale fotopolimerizzante per porta-impronte individuale

## Siliconi

Pagine 37 - 40

silicone per mascherine per addizione  
silicone extra duro per mascherine  
silicone da duplicazione per addizione  
silicone A trasparente

## Abrasivo e lucidante

Pagine 41 - 42

corindone  
perle autolucidanti  
polvere pomice  
pico-strahlresin  
Liquido di miscelazione all'uso per polvere  
di pietra pomice e pico-strahlresin

## Technica di fusione

Pagine 43 - 45

rivestimenti  
Resina per modellazione autoindurente  
inserti per cilindri  
cilindri da fusione



## pico-rock® select

Gesso speciale per monzoni

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Scopra il nuovo gesso per arcate dentali con affascinanti proprietà. Estrema finezza nella lavorazione – massima durezza nel risultato.

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 gr. di polvere: | 18-20 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                           | 6-7 minuti                       |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:              | 45 secondi                       |
| Sfilabili dopo:                                 | ca. 35-40 minuti                 |
| Durezza dopo 24 h:                              | ca. 330 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a trazione e flessione dopo 24 h:    | ca. 70 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione DIN EN (2 h):                        | < 0,08 %                         |

| Colore   | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg<br>(4 x 5 kg Sacchetto termico) | Cod.-Art.<br>Cartone da 5 kg<br>(1 x 5 kg Sacchetto termico) |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| toffee   | 1109 5620                                                     | 1109 5605                                                    |
| sunshine | 1109 4420                                                     | 1109 4405                                                    |
| moon     | 1109 5020                                                     | 1109 5005                                                    |
| pearl    | 1109 1120                                                     | 1109 1105                                                    |

## picodent quadro-rock® plus

Gesso speciale per monzoni


Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Qualità ottimizzata del gesso extra duro. Tempo di lavorazione più lungo, tempo di presa più corto, bordi stabili e resistenti che non si scheggiano, superficie del modello compatta.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 19-20 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 8 minuti                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 25 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 300 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 65 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,08 %                         |

| Colore      | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 12 kg |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| giallo oro  | 1102 1120                     | _____                         |
| marrone oro | 1102 1320                     | 1102 1312                     |
| avorio      | 1102 0320                     | 1102 0112                     |
| albicocca   | 1102 1420                     | _____                         |
| pastello    | 1102 0220                     | _____                         |
| bianco      | 1102 0120                     | _____                         |
| grigio      | 1102 0321                     | _____                         |

| Colore      | Cod.-Art.<br>Cartone da 18 kg<br>(6 x 3 kg Sacchetto termico) | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg<br>(2 x 3 kg Sacchetto termico) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| giallo oro  | 1102 1163                                                     | 1102 1123                                                    |
| marrone oro | 1102 1363                                                     | 1102 1323                                                    |
| avorio      | 1102 0363                                                     | 1102 0323                                                    |
| albicocca   | 1102 1263                                                     | 1102 1223                                                    |
| pastello    | 1102 0263                                                     | 1102 0223                                                    |
| bianco      | 1102 0063                                                     | 1102 0023                                                    |
| grigio      | 1102 0463                                                     | 1102 0423                                                    |

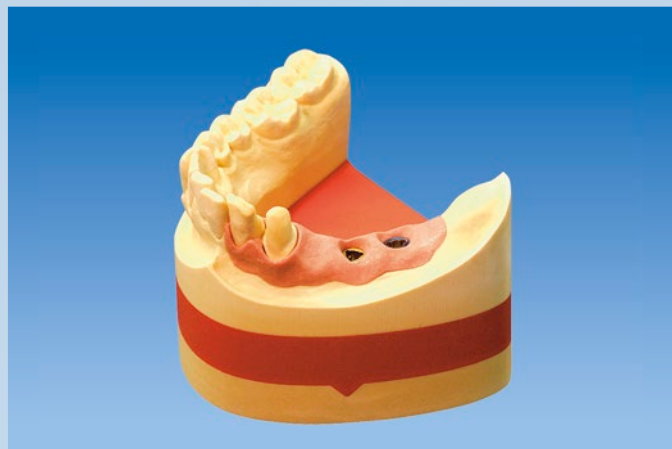

### Implantat-rock®

#### Gesso universale per monconi

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Massimi requisiti di precisione, gesso speciale extra duro per tutti i modelli: per impianti, modelli sfilabili, modelli master e per CAD/CAM. Consistenza cremosa, superfici lisce, espansione ridotta.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 19-20 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 9 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 35 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 300 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 70 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,08 %

| Colore      | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg<br>(4 x 5 kg Sacchetto termico) | Cod.-Art.<br>Cartone da 5 kg<br>(4 x 5 kg Sacchetto termico) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| giallo oro  | 1106 4420                                                     | 1106 4405                                                    |
| marrone oro | 1106 5622                                                     | 1106 5605                                                    |
| avorio      | 1106 1120                                                     | 1106 1105                                                    |
| grigio      | 1106 1321                                                     | 1106 1305                                                    |



### pico-rock® 280

#### Gesso premium per monconi

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Prodotto ampiamente testato, con eccezionale stabilità e vasto campo di applicazione. Per monconi, scheletrica e altri usi.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 20 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 280 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 60 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,1 %



| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| marrone sahara   | 1101 9020                     | 1101 9006                    |
| bianco brillante | 1101 8020                     | 1101 8006                    |
| giallo sole      | 1101 7020                     | 1101 7006                    |
| grigio           | 1101 0020                     | 1101 0006                    |
| albicocca        | 1101 4020                     | 1101 4006                    |
| giallo limone    | 1101 6020                     | 1101 6006                    |
| avorio           | 1101 1220                     | 1101 1106                    |



## pico-rock® 280 speed

Gesso a presa rapida per la preparazione di arcate dentarie

Tipo 4 conforme DIN EN ISO 6873

Per il "modello speed" veloce; tempo di lavorazione di 3 min.; eccezionale stabilità, tempo di presa rapido.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 20 ml di acqua distillata        |
| Tempo di lavorazione:                          | 3 minuti                         |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 10 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 280 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 60 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,1 %                          |

| Colore         | Cod.-Art.<br>Cartone da 15 kg |
|----------------|-------------------------------|
| oro            | 1103 9515                     |
| marrone sahara | 1103 5615                     |
| avorio         | 1103 1115                     |



## picodent quadro-rock®

Gesso tissotropico per monconi

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Gesso extra duro, tissotropico. Eccezionale fluidità. Durezza finale ottimale, rapido tempo di presa.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 20-21 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 6 minuti                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 35-40 minuti                 |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 300 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 65 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,1 %                          |

| Colore         | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| giallo oro     | 1102 0020                     | 1102 0006                    |
| beige          | 1102 1020                     | 1102 1006                    |
| grigio         | 1102 2020                     | 1102 2006                    |
| albicocca      | 1102 1220                     | 1102 1206                    |
| avorio         | 1102 6020                     | 1102 6006                    |
| marrone sahara | 1102 9120                     | 1102 9106                    |
| pesca          | 1102 0620                     | 1102 0606                    |



## Albaum-Rock plus

Gesso speciale per monconi

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Gesso super duro di ottima qualità. Non scheggia, bordi stabili, superficie compatta.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 20 ml di acqua distillata        |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 8 minuti                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 30 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 300 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 65 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,08 %                         |

| Colore      | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|-------------|-------------------------------|
| avorio      | 1107 1120                     |
| marrone oro | 1107 0020                     |
| grigio      | 1107 1320                     |



### picodent® Z 260 v

Gesso per monconi, rinforzato con resina sintetica  
Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Con miscele da estremamente fluido a solido in base alla proporzione di acqua utilizzata. Superfici dei modelli perfettamente lisce.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 18-20 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 7-8 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 60 secondi

Tempo di presa: ca. 60 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 260 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 65 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,1 %

| Colore         | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| naturale       | 1100 6020                     | 1100 6006                    |
| grigio platino | 1100 5020                     | 1100 5006                    |
| mandarino      | 1100 4020                     | 1100 4006                    |
| beige          | 1100 1020                     | 1100 1006                    |



### picodent® camtec-rock

Gesso per modelli speciale per sistemi CAD/CAM  
Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Per la sua composizione e il suo colore, questo gesso evita fastidiosi riflessi durante l'uso dello scanner.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 20 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 6 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 45 secondi

Tempo di presa: ca. 40 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 300 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 65 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,1 %

| Colore | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
| avorio | 1104 1120                     | 1104 1106                    |



### eco-stone speed

Gesso extra duro a presa rapida per modelli, ideale per antagonisti, provvisori e riparazioni di controdentatura.  
Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

eco-stone speed è già modellabile dopo 10-15 minuti, è perfetto anche per riparazioni rapide, per ribasature o per un veloce modello guida.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 25 ml acqua

Tempo di lavorazione: ca. 3 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 30 secondi

Tempo di presa: 10-15 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 210 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 50 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,1 %

| Colore | Cod.-Art.<br>Cartone da 15 kg |
|--------|-------------------------------|
| beige  | 1103 5415                     |



## pico-stone M®

Gesso extra duro speciale per scheletrica

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Il gesso ideale per scheletrica. Elevata durezza finale, molto robusto, facile da mescolare.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 21-22 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 4-5 minuti                   |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 45 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 200 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 55 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,1 %                          |

| Colore        | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|---------------|-------------------------------|
| marrone crema | 1146 9220                     |
| verde chiaro  | 1146 9120                     |
| avorio        | 1146 1120                     |



## picodent® U 180

Gesso extraduro universale

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Prodotto universale per diversi campi di applicazione, come ortodonzia e modelli antagonisti, protesi scheletrata.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 23 ml di acqua distillata        |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 5 minuti                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 45 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 180 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 50 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,1 %                          |

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| bianco brillante | 1140 8020                     | 1140 8006                    |
| verde menta      | 1140 6020                     | 1140 6006                    |
| marrone chiaro   | 1140 0420                     | 1140 0405                    |
| pesca            | 1140 0620                     | 1140 0606                    |
| giallo oro       | 1140 0720                     | 1140 0706                    |
| avorio           | 1140 1120                     | 1140 1106                    |
| blu royal        | 1140 3020                     | 1140 3006                    |



## picodent® hydro-plaster

Gesso extra-duro, elevata compatibilità con l'alginato

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Prodotto economico per l'antagonista e la protesi in resina, per tutti i materiali da impronta, ma particolarmente compatibile con l'alginato.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 23-24 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 5 minuti                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 30 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 40 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 160 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 50 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,1 %                          |

| Colore         | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|----------------|-------------------------------|
| menta          | 1141 0020                     |
| pesca          | 1141 1020                     |
| bianco         | 1141 0320                     |
| marrone chiaro | 1141 3820                     |
| giallo oro     | 1141 0220                     |
| verde mare     | 1141 2720                     |



### prothetik-stone

Gesso extra duro speciale per la protesi in resina, ad alta espansione

Tipo 5 conforme a DIN EN ISO 6873

A elevata espansione per compensare la contrazione della resina

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 22-23 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 160 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 50 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,5 %

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| bianco brillante | 1145 0020                     | 1145 0006                    |



### picodent® KFO-stone

Gesso super-duro per modelli ortodontici

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Gesso super-duro per modelli ortodontici e tutti i lavori che richiedono una durezza superficiale superiore.

Altissimo grado di bianco, elevata stabilità dei bordi, superficie liscia e antiraffio, durezza finale elevata, ottima fluidità.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 27 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 7 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 150 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 40 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,1 %

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|------------------|-------------------------------|
| bianco brillante | 1148 0020                     |



### suppen-sockler®(G)

Gesso per zoccolatura fluido

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Gesso fluido. Il modo più semplice di produrre velocemente zoccoli e Splitcast di alta precisione.

Bassi valori di espansione.

Oltre 30 altri colori disponibili.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 23-25 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 45-60 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 160 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 55 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,06 %

| Colore          | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| new-blue        | 2171 1724                     | 2171 1706                    |
| salmon          | 2171 2420                     | 2171 2406                    |
| avorio          | 2171 1120                     | 2171 1106                    |
| terracotta      | 2171 8820                     | 2171 8806                    |
| rosso da vinci  | 2170 3220                     | 2170 3206                    |
| grigio estetico | 2171 6120                     | 2171 6106                    |



## picodent® S 120

Gesso per zoccolatura

Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 6873

Prodotto ampiamente testato, rapido e stabile con bassi valori di espansione. Ottimizzato per la zoccolatura e la preparazione di Splitcast.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 25-27 ml di acqua distillata     |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 3-4 minuti                   |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 40 secondi                       |
| Tempo di presa:                                | ca. 45 minuti                    |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 120 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 40 MPa (N/mm <sup>2</sup> )  |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,06 %                         |

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 6 kg |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| bianco brillante | 1120 8021                     | 1120 8006                    |
| blu royal        | 1120 3020                     | 1120 3006                    |
| rosé             | 1120 1020                     | 1120 1006                    |



## pico-arti new edition

Gesso per articolatori sintetico

Candido. Cremoso e fine nella lavorazione. Eccellenti caratteristiche tecniche.

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 30 ml di acqua distillata       |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 3 minuti                    |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 20 seconds                      |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 90 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 30 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,03 %                        |

| Colore  | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 18 kg<br>(4 x 4,5 kg Sacchetto termico) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| candido | 1130 0020                     | 1130 0018                                                       |



## pico-arti speed

Gesso per articolatori a presa rapida

Gesso per articolatori a presa rapida, tenuta perfetta sul modello, bassa espansione.

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: | 43-45 ml di acqua distillata    |
| Tempo di lavorazione:                          | ca. 1¼ minuti                   |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:             | 15 secondi                      |
| Durezza dopo 24 ore:                           | ca. 50 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza a compressione dopo 24 ore:         | ca. 20 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Espansione dopo 2 ore:                         | < 0,04 %                        |

| Colore | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|--------|-------------------------------|
| bianco | 1132 0020                     |



### fixare presto plus

Gesso per articolatori con maggiore durezza finale

Bassi valori di espansione, maggiore durezza finale, tempo di presa rapido.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 2 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 20 secondi

Durezza dopo 24 ore: ca. 90 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 30 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,04 %

| Colore     | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg | Cod.-Art.<br>Cartone da 15 kg |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| bianco     | 2177 4021                     | 2177 4010                     |
| verde mare | 2177 2720                     | _____                         |
| new blu    | 2177 2520                     | _____                         |



### picodent® KFO-dur

Gesso duro normale

Tipo 3 conforme a DIN EN ISO 6873

Speciale per lavori di ortodonzia. Altissimo grado di bianco.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 100 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 30 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,15 %

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|------------------|-------------------------------|
| bianco brillante | 1150 8121                     |



### pico-crema soft®

Gesso duro speciale

Tipo 3 conforme a DIN EN ISO 6873

Per riparazioni e protesi in materiale plastico. Consistenza cremosa, elevata durezza finale, miscelazione priva di bolle, anche senza vuoto.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 3-4 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 30 secondi

Tempo di presa: ca. 30 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 120 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 35 MPa (N/mm<sup>2</sup>)

Espansione dopo 2 ore: < 0,15 %

| Colore | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg<br>(4 x 5 kg Sacchetto termico) | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| giallo | 0151 0020                                                     | 0151 2020                     |
| blu    | 0151 1020                                                     | 0151 3020                     |



### pico-crema soft® speed

Gesso per riparazioni a presa rapida

Tipo 3 conforme a DIN EN ISO 6873

Consistenza cremosa, elevata stabilità, tempo di presa molto rapido.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30-31 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 2-2½ minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 15-20 secondi

Tempo di presa: ca. 12-15 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 120 MPa (N/mm²)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 35 MPa (N/mm²)

Espansione dopo 2 ore: < 0,15 %

| Colore | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg<br>(4 x 5 kg Sacchetto termico) | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| giallo | 0152 0020                                                     | 0152 2020                     |
| blu    | 0152 1020                                                     | 0152 3020                     |



### picodent® N 100

Gesso duro normale

Tipo 3 conforme a DIN EN ISO 6873

Prodotto versatile per tutte le applicazioni che non richiedono un gesso extra duro, qualora sia richiesto comunque un risultato di qualità.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

Durezza dopo 24 ore: ca. 100 MPa (N/mm²)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 30 MPa (N/mm²)

Espansione dopo 2 ore: < 0,15 %

| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|------------------|-------------------------------|
| giallo vaniglia  | 1150 1020                     |
| blu marino       | 1150 0020                     |
| bianco brillante | 1150 8020                     |
| verde            | 1150 3020                     |
| giallo limone    | 1150 6020                     |
| verde mare       | 1150 2720                     |



### pico-dur

Gesso duro speciale

Tipo 3 conforme a DIN EN ISO 6873

Consistenza cremosa, elevata stabilità, tempo di presa molto rapido.

Rapporto di miscelazione per 100 g di polvere: 30 ml di acqua distillata

Tempo di lavorazione: ca. 4-5 minuti

Tempo di miscelazione sotto vuoto: 40 secondi

Tempo di presa: ca. 45 minuti

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
Durezza dopo 24 ore: ca. 100 MPa (N/mm²)

Resistenza a compressione dopo 24 ore: ca. 30 MPa (N/mm²)

Espansione dopo 2 ore: < 0,15 %


| Colore           | Cod.-Art.<br>Cartone da 20 kg |
|------------------|-------------------------------|
| blu              | 1153 0820                     |
| giallo           | 1153 0120                     |
| bianco brillante | 1153 0020                     |

|                        |                  |                |                  |                |             |            |           |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| pico-rock® select      | toffee           | sunshine       | moon             | pearl          |             |            |           |
| quadro-rock® plus      | bianco           | pastello       | avorio           | marrone oro    | giallo oro  | albicocca  | grigio    |
| Implantat-rock®        | avorio           | marrone oro    | giallo oro       | grigio         |             |            |           |
| pico-rock® 280         | bianco brillante | giallo limone  | avorio           | marrone sahara | giallo sole | albicocca  | grigio    |
| pico-rock® 280 speed   | marrone sahara   | avorio         | oro              |                |             |            |           |
| quadro-rock®           | avorio           | beige          | marrone sahara   | giallo oro     | albicocca   | grigio     | pesca     |
| Albaum-Rock plus       | avorio           | marrone oro    | grigio           |                |             |            |           |
| Z 260 v                | naturale         | mandarino      | grigio platino   | beige          |             |            |           |
| camtec-rock®           | avorio           |                |                  |                |             |            |           |
| eco-stone speed        | beige            |                |                  |                |             |            |           |
| pico-stone M           | avorio           | verde chiaro   | marrone crema    |                |             |            |           |
| U 180                  | bianco brillante | marrone chiaro | verde menta      | pesca          | giallo sole | avorio     | blu royal |
| hydro-plaster          | bianco           | marrone chiaro | peach            | menta          | giallo oro  | verde mare |           |
| prothetik-stone        | bianco brillante |                |                  |                |             |            |           |
| KFO-stone              | bianco brillante |                |                  |                |             |            |           |
| S 120                  | bianco brillante | pink           | blu royal        |                |             |            |           |
| pico-arti new edition  | candido          |                |                  |                |             |            |           |
| pico-arti speed        | bianco           |                |                  |                |             |            |           |
| fixare presto® plus    | bianco           | verde mare     | new blu          |                |             |            |           |
| KFO-dur                | bianco brillante |                |                  |                |             |            |           |
| pico-crema soft®       | giallo           | blu            |                  |                |             |            |           |
| pico-crema soft® speed | giallo           | blu            |                  |                |             |            |           |
| N 100                  | bianco brillante | giallo limone  | giallo vaniglia  | verde          | blu marino  | verde mare |           |
| pico-dur               | giallo           | blu            | bianco brillante |                |             |            |           |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |   |   |
| bianco (00)                                                                         | avorio (11)                                                                         | crema (22)                                                                           | giallo (01)                                                                          |
|    |   |   |   |
| albicocca (12)                                                                      | rosso da vinci (23)                                                                 | verde pico (35)                                                                      | blu chiaro (02)                                                                      |
|    |   |   |   |
| grigio perla (13)                                                                   | salmone (24)                                                                        | blu mare (36)                                                                        | verde (03)                                                                           |
|    |   |   |   |
| blu chiaro (14)                                                                     | blu notte (37)                                                                      | marrone chiaro (04)                                                                  | verde muschio (16)                                                                   |
|    |   |   |   |
| lilla (26)                                                                          | grigio scuro (38)                                                                   | rosa (05)                                                                            | new-blue (17)                                                                        |
|    |   |   |   |
| verde mare (27)                                                                     | pesca (06)                                                                          | giallo limone (19)                                                                   | giallo sole (07)                                                                     |
|   |  |  |  |
| azzurro (29)                                                                        | terracotta (88)                                                                     | mora (10)                                                                            | cioccolato (21)                                                                      |
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| grigio estetico (100)                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

## ATTENZIONE:

Sono possibili differenze di colore dovute alla tecnica di stampa.

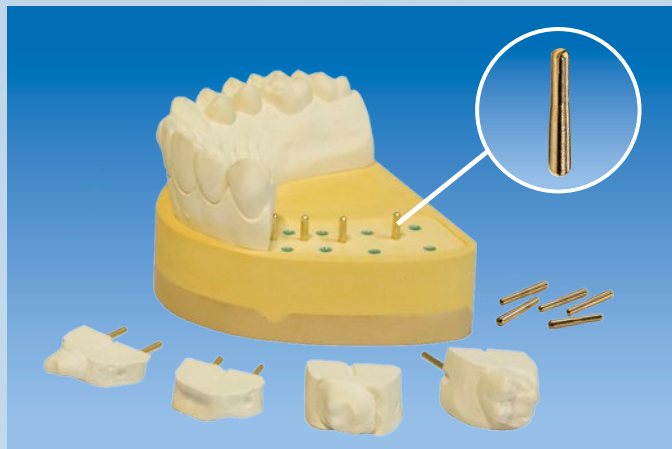

### ArtOral Modellsystem

Più precisione – Migliore calzata

Sistema di modello sfilabile avanzato con pillar-pin supplementare (pin pilastro).

Il grande vantaggio del sistema per modelli ArtOral, oltre alla combinazione di materiali sinergici, è l'uso di un ulteriore pillar-pin (pin pilastro), che impedisce lo spostamento laterale dei monconi nella zona interdentale e conferisce una stabilità di gran lunga superiore. In tal modo si ottiene l'assoluta precisione della posizione del moncone in gesso. Inoltre il 2. pin del sistema di modelli, il soft-pin oppure lo smart-pin, garantisce una lavorazione pulita al momento della sfilatura dei monconi in gesso.

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione |
|-----------|--------------------|------------|
| 1408 0500 | pillar-pin, 1,6 mm | 500 pezzi  |



### picodent® smart-pin

Nuovo, pin picodent più corto (L: 16,2 mm).

Perfetta chiusura con la base in gesso.

Con frizione morbida uniforme, perciò ideali per il sistema per modelli ArtOral.

| Cod.-Art. | Descrizione                 | Confezione                                                                        |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1406 6001 | picodent® smart-pin, 1,6 mm | Confezione completa<br>1.000 pin a conicità aumentata<br>1.000 guaine in plastica |
| 1406 6002 | picodent® smart-pin, 1,6 mm | 1.000 pin a conicità aumentata                                                    |
| 1406 6003 | picodent® smart-pin, 1,6 mm | 1.000 guaine in plastica                                                          |




### picodent® pin K "snap"

Sistema di pin a conicità aumentata picodent: un pin particolarmente raffinato. Con effetto "snap".

Questo sistema, consistente di pin cilindrici a conicità aumentata e guaine in plastica, combina per la prima volta i vantaggi dei sistemi conici con quelli dei sistemi paralleli.

| Cod.-Art. | Descrizione                    | Confezione                                                                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1406 1000 | picodent® pin K "snap", 1,6 mm | Confezione completa<br>1.000 pin a conicità aumentata<br>1.000 guaine in plastica |
| 1406 1002 | picodent® pin K "snap", 1,6 mm | 1.000 pin a conicità aumentata                                                    |
| 1406 1001 | picodent® pin K "snap", 1,6 mm | 1.000 guaine in plastica                                                          |

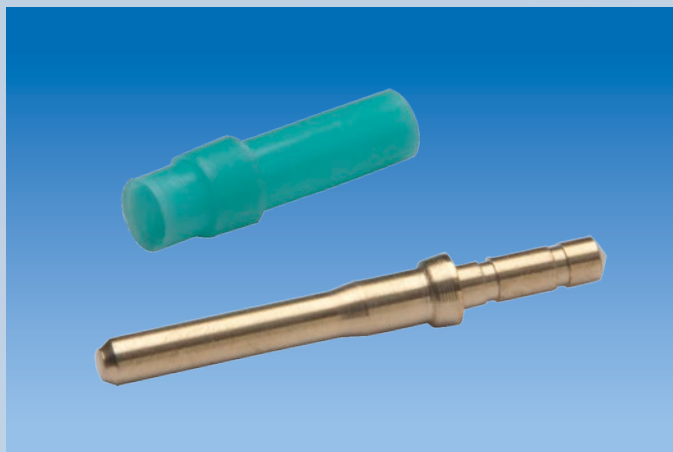

## picodent® soft-pin

Pin a conicità aumentata con guaina in plastica

Pin a conicità aumentata con morbida guaina in plastica, adatti anche per il sistema per modelli Art Oral.

| Cod.-Art. | Descrizione                | Confezione                                                                        |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1406 2000 | picodent® soft-pin, 1,6 mm | Confezione completa<br>1.000 pin a conicità aumentata<br>1.000 guaine in plastica |
| 1406 2002 | picodent® soft-pin, 1,6 mm | 1.000 pin a conicità aumentata                                                    |
| 1406 2001 | picodent® soft-pin, 1,6 mm | 1.000 guaine in plastica                                                          |




## picodent® pin MK 2, 1,6 mm

Gli “approvati” con la guaina in metallo più parallelismo garantito

Il vantaggio essenziale del sistema MK 2 sta nella forma a colletto della superficie d'appoggio dei pin. In questo modo tutti i pin possono essere incollati ad angolo retto.

| Cod.-Art. | Descrizione                | Confezione                                                         |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1407 1000 | picodent® pin MK 2, 1,6 mm | Confezione completa<br>1.000 pin conici<br>1.000 guaine in metallo |
| 1407 1001 | picodent® pin MK 2, 1,6 mm | 1.000 pin conici                                                   |
| 1407 1002 | picodent® pin MK 2, 1,6 mm | 1.000 guaine in metallo                                            |

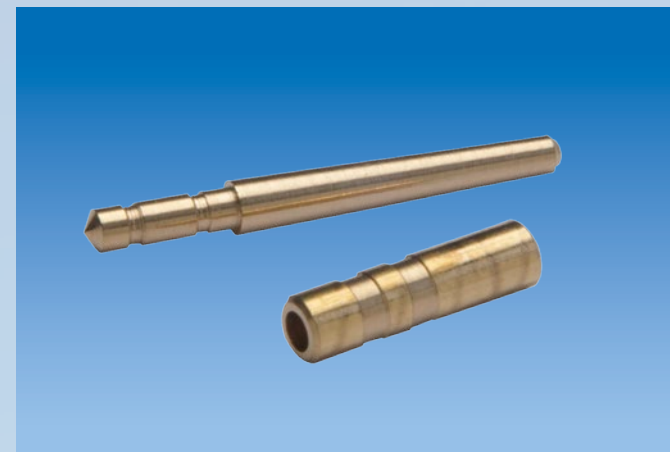

## picodent® pin M

Gli “approvati” con la guaina in metallo

Nella combinazione pin conico + anello in plastica oppure pin conico + guaina in metallo.

| Cod.-Art. | Descrizione             | Confezione                                                         |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1404 1000 | picodent® pin M, 1,6 mm | Confezione completa<br>1.000 pin conici<br>1.000 guaine in metallo |
| 1404 1002 | picodent® pin M, 1,6 mm | 1.000 pin conici                                                   |
| 1404 1001 | picodent® pin M, 1,6 mm | 1.000 guaine in metallo                                            |



### picodent® pinbohrer, 1,6 mm

Fresa in carburo di tungsteno per sistema di modelli ArtOral, Pin MK 2, Pin M, Pin K e smart-pin

Utilizzabile con tutti i foragessi.

Disponibile anche con gambo grosso.

Misure particolari su richiesta.

| Cod.-Art. | Descrizione                                                  | Confezione |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1405 0001 | picodent® pinbohrer                                          | 1 pezzo    |
| 1405 0002 | picodent® pinbohrer mit verstärkter Seele (con gambo grosso) | 1 pezzo    |



### Umkehrformplatte

La base invertita Vi fa risparmiare tempo e denaro

Con la base invertita si possono consumare le rimanenze di gesso, risparmiando tempo e denaro.

Riempire con le rimanenze di gesso la base su cui è stato inserito l'anello in gomma e la piastrina metallica (oppure il magnete con il suo contenitore), applicare le ritenzioni e lasciare indurire.

**Risultato: uno zoccolo secondario già realizzato.**

| Cod.-Art. | Descrizione                                 | Confezione |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| 1600 0016 | Umkehrformplatte (8), in plastica massiccia | 1 pezzo    |




### Formplatten Kunststoff

Sistema sinergico per la realizzazione di zocchi primari

Queste basi sono già comprovate da molti anni. Per la fabbricazione dello zoccolo primario la base si inserisce nell'anello in gomma corrispondente. Utilizzando basi in plastica per la colata dello zoccolo, disponibili in varie misure, è possibile risparmiare una notevole quantità di gesso e di tempo.

| Cod.-Art. | Descrizione                                 | Confezione |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| 1600 0012 | Formplatte (7), piccola, in plastica        | 1 pezzo    |
| 1600 0011 | Formplatte (8), standard media, in plastica | 1 pezzo    |

| Cod.-Art. | Descrizione                                                 | Confezione |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1600 0002 | Formplatte (7), piccola, in plastica massiccia              | 1 pezzo    |
| 1600 0001 | Formplatte (8), dimensioni standard, in plastica massiccia  | 1 pezzo    |
| 1600 0013 | Formplatte (9), grande, in plastica massiccia               | 1 pezzo    |
| 1600 0015 | Formplatte (11), dimensioni speciali, in plastica massiccia | 1 pezzo    |

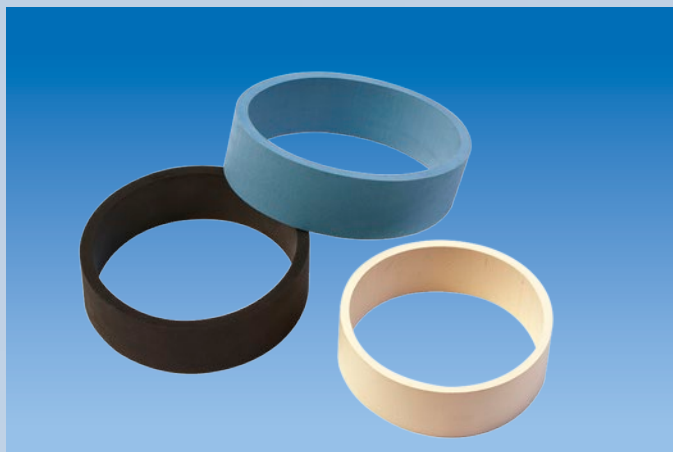

## Gummiringe per basi Splitcast e basi per modelli

Adatto per tutti i sistemi di perni

L'altezza degli anelli in gomma standard (22 mm) è appositamente studiata per lo stelo di inserimento dei nostri sistemi di perni in modo che le punte dei perni risultino immediatamente visibili nella parte inferiore dello zoccolo dopo aver effettuato lo sfilo.

| Cod.-Art  | Descrizione                         | Confezione |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| 1600 0032 | Gummiring (7), piccolo              | 1 pezzo    |
| 1600 0031 | Gummiring (8), dimensioni standard  | 1 pezzo    |
| 1600 0033 | Gummiring (9), grande               | 1 pezzo    |
| 1600 0035 | Gummiring (11), dimensioni speciali | 1 pezzo    |

Altezza di 25 mm in caso di utilizzo di gessi fluidi per zoccolatura.




## tip-top sockelformer

Per una perfetta aderenza al modello del morso antagonista

Con il formatore per zoccoli di picodent® è possibile realizzare modelli perfetti del morso antagonista

Il formatore è costituito da gomma di alta qualità con ritenzione di pre-formatura. Il formatore per zoccoli consente una rapida articolazione e garantisce un'ottimale aderenza al modello del morso antagonista.

| Cod.-Art. | Descrizione                   | Confezione |
|-----------|-------------------------------|------------|
| 1410 0002 | tip-top sockelformer, piccolo | 1 pezzo    |
| 1410 0001 | tip-top sockelformer, grande  | 1 pezzo    |

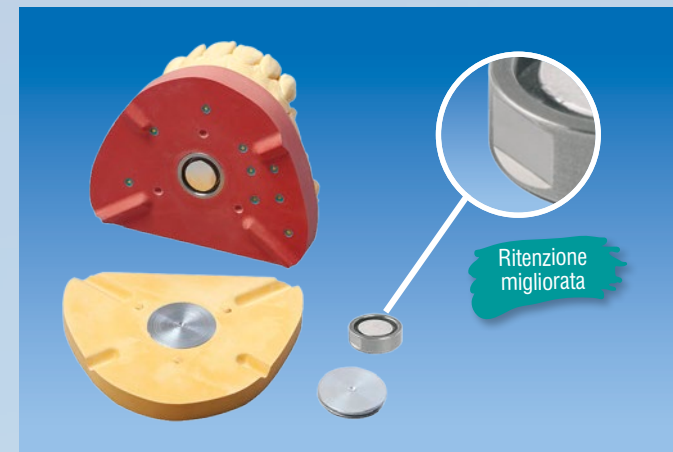

Ritenzione  
migliorata

## picolino Magnetsystem

Contenitori per magneti e piastrine metalliche estremamente tenaci, piatti e piccoli. Splitcast in gesso piatto per migliori condizioni di spazio in articolatore. Il sistema di magneti è in acciaio inossidabile riutilizzabile.


| Cod.-Art. | Descrizione                                                          | Confezione                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1600 3150 | picolino Magnete (magneti) Ø 10 mm, altezza 3 mm                     | 50 pezzi                                                                                                                                                           |
| 1600 3250 | picolino Magnettöpfe (contenitori per magneti) Ø 15 mm, altezza 5 mm | 50 pezzi                                                                                                                                                           |
| 1600 3350 | picolino Haftplatten (piastrine metalliche) Ø 20 mm, altezza 2 mm    | 50 pezzi                                                                                                                                                           |
| 1600 3001 | picolino Magnetheber (sfila magneti)                                 | 1 pezzo                                                                                                                                                            |
| 1600 3999 | picolino Starter-Set                                                 | Che comprende:<br>· 20 pz picolino Magnete<br>· 20 pz picolino Haftplatten<br>· 20 pz picolino Magnettöpfe<br>· 1 pz picolino Magnetheber<br>· 10 pz Zentrierkegel |



### Magnettöpfe · Magnete · Haftplatten

Alta adesione. Riutilizzabili. Utilizzabili anche per il sistema di modelli zeiser®.

| Cod.-Art. | Descrizione                                                                      | Confezione |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1600 0042 | Magnettöpfe (contenitori per magneti)                                            | 50 pezzi   |
| 1600 1042 | Magnettöpfe Edelstahl, rostfrei (contenitori per magneti, acciaio inox)          | 50 pezzi   |
| 1600 0044 | Magnete (calamite)                                                               | 50 pezzi   |
| 1600 0046 | Haftplatten (piastrine metalliche per magneti)                                   | 50 pezzi   |
| 1600 1046 | Haftplatten Edelstahl, rostfrei (piastrine metalliche per magneti, acciaio inox) | 50 pezzi   |
| 1600 0101 | Haftplatten Ø 35 mm (piastrine metalliche per magneti)                           | 100 pezzi  |
| 1600 0047 | Magnetheber (sfila magneti)                                                      | 1 pezzo    |

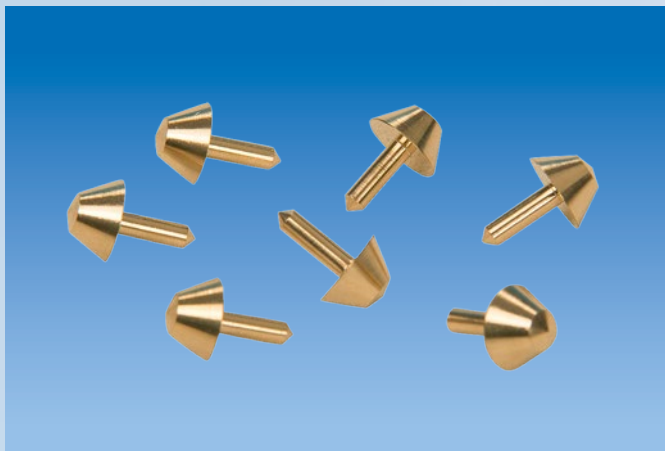

### picodent® zentrierkegel

Assicurano modelli perfetti

Perforare con la fresa per pin 1,6 mm e isolare il cono. Evita che il modello si sporchi sulla base.

| Cod.-Art. | Descrizione             | Confezione |
|-----------|-------------------------|------------|
| 1600 0051 | picodent® zentrierkegel | 50 pezzi   |



### picodent® picocryl

Colla a base di cianoacrilato

Fluida e a presa rapida. Ideale come collante per perni.

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione       |
|-----------|--------------------|------------------|
| 1505 0035 | picodent® picocryl | Flacone da 10 ml |



### zeiser®-Pinbohrgerät P10

| Cod.-Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0017 6800 | zeiser®-Pinbohrgerät P10<br>Confezione:<br>· fresa al carburo di tungsteno,<br>· supporto per piastre piccolo,<br>· base portaimpronte,<br>· cacciavite esagonale per la sostituzione delle frese,<br>· cacciavite piccolo per regolazione<br>· alimentazione<br>· radiotasto |
| 0017 6150 | zeiser®-Plattenhalter                                                                                                                                                                                                                                                         |



### zeiser®-Einführungsset

Il kit introduttivo per l'utilizzatore zeiser®.

Comprende tutti i materiali necessari per la realizzazione di modelli zeiser e gli strumenti per zeiser II.

| Cod.-Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0099 9250 | zeiser®-Einführungsset<br>confezione:<br>1 x zeiser®-Sockelplatte, bianco, rotonda/piccola, 100 pezzi<br>1 x Snap-On Basisplatte, rotonda/piccola, 10 pezzi<br>1 x Magnets M4 for Snap-On Platte, 10 pezzi<br>1 x Combisil, 1 kg<br>1 x zeiser®-pin 14, rotonda, 1.000 pezzi<br>1 x zeiser®-pin 14 short, 1.000 pezzi<br>1 x piastra orientabile chiara, rotonda/piccola, 1 pezzo<br>1 x fascia metallo<br>3 x base portaimpronta<br>1 x placche magnetiche M8, 50 pezzi<br>1 x brugola corta per placche magnetiche<br>1 x martello<br>1 x zeiser®-foragessi P 10<br>1 x fogli mantenitori di spazio, 100 pezzi<br>1 x lama cutter<br>1 x supporto per banda abrasiva<br>1 x banda abrasiva K80, 50 pezzi |



### zeiser®-Sockelplatte, rund

Piastre zeiser® originali rotonda/piccola per il sistema per modelli zeiser®.

| Cod.-Art. | Descrizione                                                             | Colore     | Confezione |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0057 6825 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola                                   | bianco     | 100 pezzi  |
| 0057 6856 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola                                   | terracotta | 100 pezzi  |
| 0057 6842 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola                                   | blu        | 100 pezzi  |
| 0057 6844 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola                                   | grigio     | 100 pezzi  |
| 0057 6889 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola, con placca magnetica pre-montata | bianco     | 100 pezzi  |
| 0057 6890 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola, con placca magnetica pre-montata | terracotta | 100 pezzi  |
| 0057 6843 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola, con placca magnetica pre-montata | blu        | 100 pezzi  |
| 0057 6894 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/piccola, con placca magnetica pre-montata | grigio     | 100 pezzi  |
| 0057 6854 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/grande                                    | bianco     | 100 pezzi  |
| 0057 6855 | zeiser®-Sockelplatte, rotonda/grande, con placca magnetica pre-montata  | bianco     | 100 pezzi  |



### zeiser®-Sockelplatte, klassisch

Piastre zeiser® originali per la sistematica per modelli zeiser®.

Disponibile nei colori bianco, blu, terracotta, grigio, nero, giallo e verde.

| Colore     | Cod.-Art. zeiser®-Sockelplatte, piccola                                            | Cod.-Art. zeiser®-Sockelplatte, grande                                            | Confezione |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| bianco     | 0057 6830                                                                          | 0057 6840                                                                         | 100 pezzi  |
| blu        | 0057 6836                                                                          | 0057 6846                                                                         | 100 pezzi  |
| terracotta | 0057 6820                                                                          | 0057 6828                                                                         | 100 pezzi  |
| grigio     | 0057 6838                                                                          | 0057 6848                                                                         | 100 pezzi  |
| nero       | 0057 6835                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |
| giallo     | 0057 6832                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |
| verde      | 0057 6834                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |
| Colore     | Cod.-Art. Cod.-Art. zeiser®-Sockelplatte, piccola con placca magnetica pre-montata | Cod.-Art. Cod.-Art. zeiser®-Sockelplatte, grande con placca magnetica pre-montata | Confezione |
| bianco     | 0057 6831                                                                          | 0057 6841                                                                         | 100 pezzi  |
| blu        | 0057 6837                                                                          | 0057 6847                                                                         | 100 pezzi  |
| terracotta | 0057 6821                                                                          | 0057 6829                                                                         | 100 pezzi  |
| grigio     | 0057 6839                                                                          | 0057 6849                                                                         | 100 pezzi  |
| nero       | 0057 6893                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |
| giallo     | 0057 6891                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |
| verde      | 0057 6892                                                                          | _____                                                                             | 100 pezzi  |

### zeiser®-Snap-On Platte, rund

Per il perfetto Splitcast

Sistema sinergico, elevata precisione, migliore calzata, riutilizzabile, con magneti sostituibile.

| Cod.-Art. | Descrizione                                        | Confezione                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0057 6826 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/piccola            | 10 pezzi                                                         |
| 0057 6851 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/piccola            | 50 pezzi                                                         |
| 0057 6903 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/piccola offerta I  | 10 zeiser®-Snap-On Platten, rotonda/piccola, incl. 10 magneti M4 |
| 0057 6904 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/piccola offerta II | 50 zeiser®-Snap-On Platten, rotonda/piccola, incl. 50 magneti M4 |
| 0057 6817 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/grande             | 10 pezzi                                                         |
| 0057 6852 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/grande             | 50 pezzi                                                         |
| 0057 6901 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/grande offerta I   | 10 zeiser®-Snap-On Platten, rotonda/grande, incl. 10 magneti M4  |
| 0057 6902 | zeiser®-Snap-On Platte, rotonda/grande offerta II  | 10 zeiser®-Snap-On Platten, rotonda/grande, incl. 50 magneti M4  |
| 0057 6758 | zeiser®-Rundmagnete M4                             | 10 magneti M4, rotonda                                           |



### zeiser®-Snap-On Platte, klassisch

Per il perfetto Splitcast

Sistema sinergico, elevata precisione, migliore calzata, riutilizzabile, con magnete sostituibile.

| Cod.-Art. | Descrizione                                 | Confezione                                               |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0057 6810 | zeiser®-Snap-On Platte, piccola             | 10 pezzi                                                 |
| 0057 6850 | zeiser®-Snap-On Platte, piccola             | 50 pezzi                                                 |
| 0057 6896 | zeiser®-Snap-On Platte, piccola, offerta I  | 10 zeiser®-Snap-On Platten, piccola, incl. 10 magneti M4 |
| 0057 6897 | zeiser®-Snap-On Platte, piccola, offerta II | 50 zeiser®-Snap-On Platten, piccola, incl. 50 magneti M4 |
| 0057 6815 | zeiser®-Snap-On Platte, grande              | 10 pezzi                                                 |
| 0057 6860 | zeiser®-Snap-On Platte, grande              | 50 pezzi                                                 |
| 0057 6898 | zeiser®-Snap-On Platte, grande, offerta I   | 10 zeiser®-Snap-On Platten, grande, incl. 10 magneti M4  |
| 0057 6899 | zeiser®-Snap-On Platte, grande, offerta II  | 50 zeiser®-Snap-On Platten, grande, incl. 50 magneti M4  |




### zeiser®-Combisil

Materiale per impronte in silicone riutilizzabile

Non aderisce al gesso. Adatto anche per il bloccaggio di materiali da impronta.

| Cod.-Art. | Descrizione      | Confezione |
|-----------|------------------|------------|
| 0057 6080 | zeiser®-Combisil | 1 kg       |
| 0057 6081 | zeiser®-Combisil | 5 kg       |

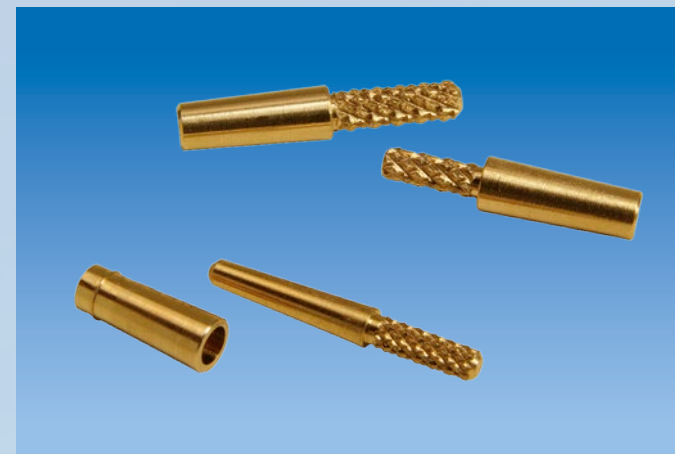

### zeiser®-Pins

Perni originali per la sistemica per modelli zeiser®


| Cod.-Art. | Descrizione                                      | Confezione   |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 0057 6050 | zeiser®Pin 14, rotondi                           | 1.000 pezzi  |
| 0057 6051 | zeiser®-Pin 14, rotondi                          | 10.000 pezzi |
| 0057 6052 | zeiser®-Pin 14, short zigrinatura corta, sottile | 1.000 pezzi  |
| 0017 6010 | zeiser®-Pin-Bohrer                               | 1 pezzo      |
| 0057 6480 | zeiser®-Keramikpin                               | 25 pezzi     |



### zeiser®-M8 Magnethalteplatten

Riutilizzabili, molto economiche

| Cod.-Art. | Descrizione                                            | Confezione |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 0057 6640 | zeiser®-M8 Magnethalteplatten                          | 50 pezzi   |
| 0057 6695 | zeiser®-Innensechskant 3,0 kurz für Magnethalteplatten | 1 pezzo    |

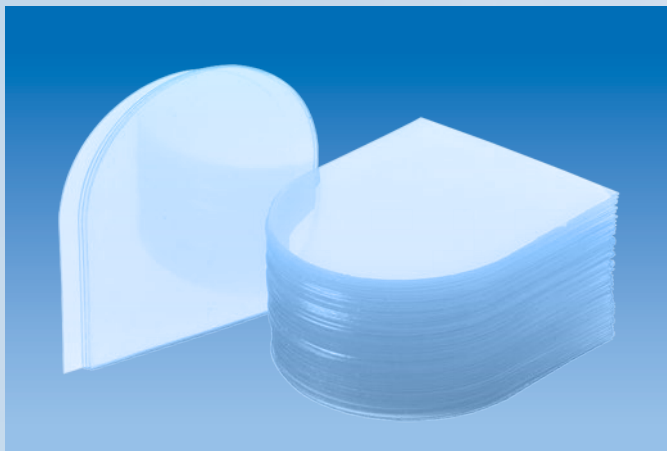

### zeiser®-Platzhalterfolie

Fogli mantenitori di spazio per il montaggio in articolatore


| Cod.-Art. | Descrizione              | Confezione |
|-----------|--------------------------|------------|
| 0057 6805 | zeiser®-Platzhalterfolie | 100 pezzi  |



### zeiser®-Schleifband/-träger

Cilindri abrasivi per la rifinitura dell'arcata dentaria

| Cod.-Art. | Descrizione                                         | Confezione |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 0081 5600 | zeiser®-Träger für Kappe 7 x 13 mm                  | 1 pezzo    |
| 0081 5400 | zeiser®-Träger für Kappe 13 x 19 mm                 | 1 pezzo    |
| 0081 5300 | zeiser®-Träger für Schleifband 12 x 13 mm           | 1 pezzo    |
| 0081 6080 | zeiser®-Schleifkappe Korn 80 für Träger 7 x 13 mm   | 50 pezzi   |
| 0081 6150 | zeiser®-Schleifkappe Korn 150 für Träger 7 x 13 mm  | 50 pezzi   |
| 0081 6320 | zeiser®-Schleifkappe Korn 320 für Träger 7 x 13 mm  | 50 pezzi   |
| 0081 5080 | zeiser®-Schleifkappe Korn 80 für Träger 13 x 19 mm  | 50 pezzi   |
| 0081 5150 | zeiser®-Schleifkappe Korn 150 für Träger 13 x 19 mm | 50 pezzi   |
| 0081 5320 | zeiser®-Schleifkappe Korn 320 für Träger 13 x 19 mm | 50 pezzi   |
| 0081 5310 | zeiser®-Schleifband Korn 80 für Träger 12 x 13 mm   | 50 pezzi   |
| 0081 5330 | zeiser®-Schleifband Korn 120 für Träger 12 x 13 mm  | 50 pezzi   |
| 0081 5340 | zeiser®-Schleifband Korn 240 für Träger 12 x 13 mm  | 50 pezzi   |

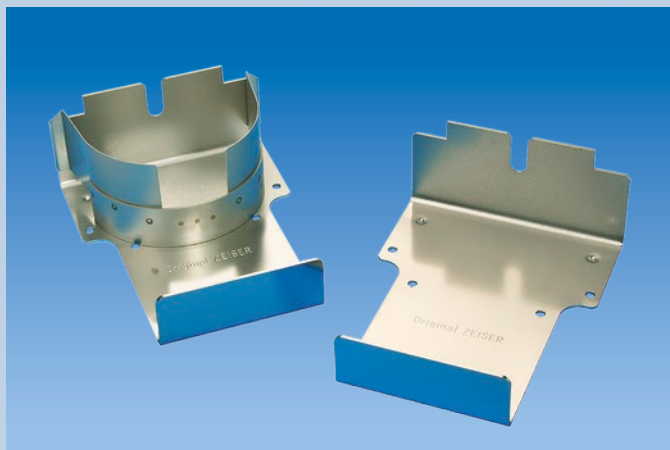

### zeiser®-Abdruckträger

Per il fissaggio dell'impronta con Combisil

| Cod.-Art. | Descrizione                  | Confezione |
|-----------|------------------------------|------------|
| 0017 6033 | zeiser®-Abdruckträger        | 1 pezzo    |
| 0017 6042 | zeiser®-Abdruckträger, 65 mm | 1 pezzo    |
| 0057 6360 | zeiser®-Metall-Manschette    | 1 pezzo    |



### zeiser®-Segmentküvette

Per la duplicazione di segmenti

| Cod.-Art. | Descrizione                                  | Confezione |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 0057 6610 | zeiser®-Segmentküvette Größe 1               | 1 pezzo    |
| 0057 6612 | zeiser®-Segmentküvette Größe 2               | 1 pezzo    |
| 0057 6613 | zeiser®-Segmentküvette Größe 3               | 1 pezzo    |
| 0057 6614 | zeiser®-Vollküvette für große Sockelplatten  | 1 pezzo    |
| 0057 6615 | zeiser®-Vollküvette für kleine Sockelplatten | 1 pezzo    |



## DaVinci's *Majesthetik<sup>®</sup> - Stumpfix<sup>®</sup>*

### Materiale per monconi a doppia polimerizzazione

Majesthetik<sup>®</sup>-Stumpfix<sup>®</sup> è un materiale per monconi a doppia polimerizzazione per la realizzazione di monconi in resina ad alta precisione sulla base di sovraimpronte di travate e monconi fresati in metalli nobili, metalli non nobili e ZrO<sub>2</sub>, realizzati manualmente o con tecnologia CAD/CAM per l'odontotecnica. Majesthetik<sup>®</sup>-Stumpfix combina sia la foto-polimerizzazione che l'auto-polimerizzazione. La lampada di fissaggio Majesthetik<sup>®</sup> consente il semplice fissaggio dei perni di ritenzione Majesthetik<sup>®</sup> nel moncone e permette pertanto una lavorazione rapida e razionale. L'auto-polimerizzazione garantisce un'affidabile polimerizzazione in profondità.

Il materiale nel colore naturale del dente migliora l'estetica nella realizzazione dei modelli e impedisce che traspaia il sottofondo, in particolare nei manufatti in ZrO<sub>2</sub>.



Per ulteriori informazioni e un  
breve video esplicativo consultare  
[www.picodent.de/stumpfix](http://www.picodent.de/stumpfix)


| Cod.-Art. | Descrizione                                                      | Confezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1550 4220 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup> Starter-Set      | 2 x 16 g siringhe a doppia camera,<br>16 x Majesthetik <sup>®</sup> Automix cannule,<br>1 lampada di fissaggio Majesthetik <sup>®</sup> ,<br>Separator da 50 ml con pennello,<br>100 perni di ritenzione Majesthetik <sup>®</sup> ,<br>1 Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup><br>Plexiglasständer |
| 1550 4216 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup> Set              | 2 x 16 g siringhe a doppia camera,<br>16 x Majesthetik <sup>®</sup> Automix cannule                                                                                                                                                                                                                          |
| 1550 4516 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup>                  | Ricarica: 5 x 16 g siringhe<br>a doppia camera                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1550 4550 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup> Separator        | Flacone da 50 ml<br>con pennello                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1550 4040 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup> Automix Kanülen  | Ricarica: 40 x Majesthetik <sup>®</sup><br>Automix cannule                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1550 0300 | Majesthetik <sup>®</sup> Fixierungslampe                         | 1 pezzo<br>lampada di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1550 4520 | Majesthetik <sup>®</sup> -Stumpfix <sup>®</sup> Plexiglasständer | 1 pezzo<br>supporto plexiglass                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## DaVinci's *Majesthetik<sup>®</sup> - Retentionspin*

### Per monconi in resina in base a sovraimpronte

Garantiscono un'adesione perfetta al moncone e al modello.  
Adatti in particolare a monconi sottili.

| Cod.-Art. | Descrizione                             | Confezione                                                |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1550 1100 | Majesthetik <sup>®</sup> -Retentionspin | 100 pezzi<br>perni di ritenzione Majesthetik <sup>®</sup> |
| 1550 1500 | Majesthetik <sup>®</sup> -Retentionspin | 500 pezzi<br>perni di ritenzione Majesthetik <sup>®</sup> |

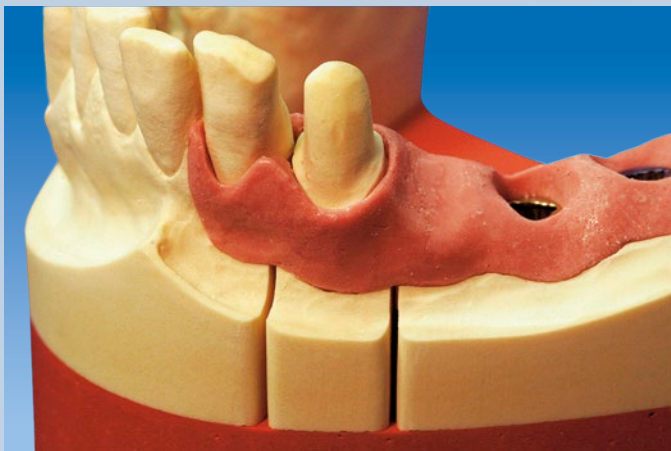

### DaVinci's Majesthetik® - Gingiimplant

Mascherina gengivale specifica per la tecnica d'implanti

Con Majesthetik®-Gingiimplant l'utente ha la possibilità di verificare il profilo della gengiva.

Elevata durezza finale (durezza shore: 70), molto buona da rifinire, colore naturale, alta stabilità.

| Cod.-Art. | Descrizione                                | Confezione                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1550 2250 | Majesthetik®-Gingiimplant                  | Kit con 2 x 50 ml doppie cartucce e 12 cannule da miscelazione |
| 1550 2850 | Majesthetik®-Gingiimplant Doppelkartuschen | Ricariche: 8 x 50 ml doppie cartucce                           |
| 1550 5040 | Majesthetik®-Zahnfleischmaske Mischkanülen | Ricariche, 40 cannule da miscelazione                          |



### DaVinci's Majesthetik® - Gingiva

Mascherina gengivale per produzione zona marginale di corone e ponti

Majesthetik®-Gingiva con caratteristiche ottimali: tinta opaca della gengiva, elevata resistenza, notevole resistenza allo strappo ed elevata durezza finale (durezza shore: 62).

| Cod.-Art. | Descrizione                                | Confezione                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1550 1250 | Majesthetik®-Gingiva                       | Kit con 2 x 50 ml doppie cartucce e 12 cannule da miscelazione |
| 1550 1850 | Majesthetik®-Gingiva Doppelkartuschen      | Ricariche: 8 x 50 ml doppie cartucce                           |
| 1550 5040 | Majesthetik®-Zahnfleischmaske Mischkanülen | Ricariche: 40 cannule da miscelazione                          |



### DaVinci's Majesthetik® - Gingiva scan

Mascherina gengivale speciale per l'impiego nella tecnica CAD/CAM

Versione scannerizzata per la rilevazione digitale in 3D senza produzione di polvere.

Elevata durezza finale (durezza Shore: 70) ed ottima stabilità.

| Cod.-Art. | Descrizione                                | Confezione                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1550 3250 | Majesthetik®-Gingiva scan                  | Kit con 2 x 50 ml doppie cartucce e 12 cannule da miscelazione |
| 1550 5040 | Majesthetik®-Zahnfleischmaske Mischkanülen | Ricariche: 40 cannule da miscelazione                          |

**Separator per Mascherina gengivale vedi pagina 27: Majesthetik-Separator da spruzzare e applicare.**



### DaVinci's *Majesthetik®-Separator*

Separatore ideale da spruzzare o applicare tramite pennello tra maschere gengivali Majesthetik® e silicone A o C, utile anche per isolare impronte in polietere prima del riempimento con poliuretano (ad es. picopoly).

| Cod.-Art. | Descrizione            | Confezione                                                                        |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1550 0050 | Majesthetik®-Separator | Flacone dotato di tappo e pennello integrato, con testina nebulizzatrice da 50 ml |

### DaVinci's *Majesthetik®-Line*

Iniettore picodent per cartucce doppie DS 50

Per l'applicazione di Majesthetik®-Gingiva, Majesthetik®-Gingiimplant ed esthetic-gum con cartucce doppie DS 50.

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione |
|-----------|--------------------|------------|
| 1550 1002 | picodent® Injektor | 1 pezzo    |

### DaVinci's *Majesthetik®-Texturpuder*

Facilita il riconoscimento delle strutture anatomiche

Aiuta a riconoscere i contorni e le strutture superficiali dei denti. Si pulisce semplicemente con il vapore.

La polvere di consistenza pastosa si applica con il pennello sulla superficie della corona. Facile da usare, semplice da rimuovere.

Profumo di arancia

| Cod.-Art. | Descrizione                                    | Confezione        |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1550 0200 | Majesthetik®-Texturpuder argento, con pennello | Scatolina da 20 g |
| 1550 0250 | Majesthetik®-Texturpuder oro, con pennello     | Scatolina da 20 g |



DaVinci's *Majesthetik®-Laseal*

Vernice fotopolimerizzabile per gesso  
Indurente e sigillante per monconi in gesso.

| Cod.-Art. | Descrizione         | Confezione                                            |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1550 0010 | Majesthetik®-Laseal | Flacone dotato di tappo e pennello integrato da 10 ml |

DaVinci's *Majesthetik®-Divi-Fluid K*

Isolante gesso / ceramica  
Isolante speciale per isolare il gesso dalla ceramica.  
Poco prodotto è sufficiente per isolare bene le superfici.

| Cod.-Art. | Descrizione               | Confezione                                            |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1550 1012 | Majesthetik®-Divi-Fluid K | Flacone dotato di tappo e pennello integrato da 12 ml |



## picopoly®

Resina poliuretanica bicomponente per monconi sfilabili e modelli master di alta precisione

- fluida
- stabile dimensione
- precisa nel dettaglio
- non si scheggia ai bordi
- facile da segare e da fresare

| Cod.-Art. | Descrizione                           | Confezione                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1280 0001 | picopoly®-Set<br>(colore base bianco) | Kit composto da:<br>3 x 220 g base<br>1 x 100 g catalizzatore<br>3 x misurino piccola<br>1 x misurino grande<br>4 x spatola piccola<br>2 x spatola grande<br>1 x pasta colorante albicocca |
| 1280 0002 | picopoly®-Set<br>(colore base bianco) | Kit come per 1280 0001,<br>pasta colorante marrone oro                                                                                                                                     |

| Cod.-Art. | Descrizione                        | Confezione     |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| 1280 0008 | picopoly®-Farbpaste<br>albicocca   | Flacone da 8 g |
| 1280 0018 | picopoly®-Farbpaste<br>marrone oro | Flacone da 8 g |

## pico-scanspray pro

Per tutti i sistemi CAD/CAM

Assicura una perfetta qualità dell'immagine ottica.  
E' sufficiente un sottilissimo strato coprente. Facile da rimuovere.

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione           |
|-----------|--------------------|----------------------|
| 1190 0200 | pico-scanspray pro | 200 ml lattina spray |

### Importante:

Utilizzare per applicazioni con impronte di polietere Majesthetik-Separator (pagina 27).



## Scantist 3D – vanishing

Spray per scansione dentale per uso extraorale

Lo strato applicato svanisce da solo dopo la scansione.

| Item no.  | Item                    | Contents             |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1190 0100 | Scantist 3D – vanishing | 200 ml lattina spray |



## picodent® easyflow

Riduttore di tensioni per tutte le superfici dei materiali d'impronta

Antitensivo per tutti i materiali da impronta.

Spruzzare sui materiali da impronta da una distanza di circa 20 cm. Scuotere il prodotto in eccesso e non asciugare con l'aria.

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione              |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 1503 0250 | picodent® easyflow | Flacone spray da 250 ml |
| 1503 1000 | picodent® easyflow | Flacone da 1.000 ml     |
| 1503 3000 | picodent® easyflow | Tanica da 3.000 ml      |



## picodent® sockelsep

Isolante gesso-gesso

Non crea spessore. Distacco facile. Ideale per la costruzione di zoccoli con gessi fluidi come il suppen-sockler.

Nebulizzare uniformemente sulla superficie, lasciare agire per qualche istante; soffiare con cautela il prodotto in eccesso.

| Cod.-Art. | Descrizione         | Confezione              |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| 1501 0250 | picodent® sockelsep | Flacone spray da 250 ml |
| 1501 2000 | picodent® sockelsep | Flacone da 1.000 ml     |
| 1501 5001 | picodent® sockelsep | Tanica da 5.000 ml      |



## picosep

### Isolante gesso-gesso

Applicazione con pennello o a spruzzo. Protegge i modelli in gesso dall'acqua, per esempio durante la squadratura.

Stendere uno strato sottile di isolante con un pennello, oppure spruzzare abbondantemente con l'apposito nebulizzatore da una distanza di ca. 20 cm; lasciare agire. Soffiare con cautela il prodotto in eccesso. Dopo ca. 2-3 minuti si può applicare il gesso.

| Cod.-Art. | Descrizione | Confezione              |
|-----------|-------------|-------------------------|
| 1501 1250 | picosep     | Flacone spray da 250 ml |
| 1501 1001 | picosep     | Flacone da 1.000 ml     |
| 1501 5000 | picosep     | Tanica da 5.000 ml      |



## picodent® isoliermittel Gips gegen Kunststoff

A base alginica, isola il gesso dalla resina  
Ideale per protesi totali.

Stendere con un pennello l'isolante sul modello tiepido, lasciare assorbire il prodotto; dopo ca. 5 minuti stendere un secondo strato. Togliere l'isolante in eccesso.

Attenzione: versare sempre l'isolante dalla bottiglia originale grande in un piccolo recipiente mediante il dispenser in dotazione. Non riversare mai l'isolante non utilizzato nella bottiglia originale. Non intingere il pennellino nella bottiglia originale dopo averlo adoperato.

| Cod.-Art. | Descrizione                                      | Confezione          |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1502 1000 | picodent® isoliermittel<br>Gips gegen Kunststoff | Flacone da 1.000 ml |



## picodent® gipslöser

Solvente per gessi con efficacia rinforzata

Nuova qualità! Adatto per la tecnica galvanica.

### Applicazioni:

bicchieri da miscelazione, protesi totali, portaimpronte, fusioni (rivestimento a legante gessoso).

### Modalità d'uso:

Immergere gli oggetti da pulire nel solvente per gessi non diluito. Negli ultrasuoni con una temperatura di ca. 40-50° C si velocizza il processo di dissoluzione del gesso. Durata della pulizia: ca. 20-80 minuti. 1.000 ml sciolgono completamente più di 100 g di gesso.

| Cod.-Art. | Descrizione         | Confezione          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1190 0001 | picodent® gipslöser | Flacone da 1.000 ml |
| 1190 0005 | picodent® gipslöser | Tanica da 5.000 ml  |



## picodent® löffelreiniger

Liquido concentrato con sostanze attive per la pulizia di portaimpronte e strumenti.

Utilizzabile anche negli ultrasuoni.

### Applicazioni:

pulizia di portaimpronte, spatole da miscelazione e strumenti.

### Spettro d'azione:

scioglie i resti di cementi all'ossido di zinco-eugenolo, poliacarbossilati, cementi fosfatici e vetroionomerici, come pure residui di lacche fissanti e alginati.

| Cod.-Art. | Descrizione                            | Confezione                                                                     |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1717 0001 | picodent® löffelreiniger (concentrato) | Flacone dosatore da 1 litro (produce ca. 25 litri di soluzione pronta all'uso) |
| 1717 0003 | picodent® löffelreiniger (concentrato) | Tanica da 3.000 ml                                                             |



## picodent® dentabs

Flocculante in pastiglie per la vasca di decantazione

Con picodent dentabs si possono prevenire gli ingorghi dei tubi di scarico. Risparmiando tempo e denaro.

picodent dentabs è un flocculante di facile uso in pastiglie. Separa completamente le materie solide in sospensione di gessi, quarzi e rivestimenti. Una sola pastiglia di dentabs garantisce acqua pulita per un'intera settimana.

| Cod.-Art. | Descrizione                        | Confezione                   |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 1510 0050 | picodent® dentabs                  | 25 pezzi con porta pastiglie |
| 1510 0003 | Einhängekorb für picodent® dentabs | 1 pezzo                      |



## picodent® softknete

Materiale per fissaggio in articolatore riutilizzabile. Ideale anche per il bloccaggio dei modelli in gesso.

Plastilina soft universale per la produzione di modelli.

| Cod.-Art. | Descrizione         | Confezione |
|-----------|---------------------|------------|
| 1305 1000 | picodent® softknete | 1.000 g    |



### pico-splint star

Resina da modellazione fotopolimerizzabile, trasparente.

Realizzazione di parti modellate individuali, ad es. dime chirurgiche per implantologia, dime radiografiche, placche base, indici, mascherine di fissaggio o di trasferimento.

| Cod.-Art. | Descrizione                   | Confezione                 |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1820 2106 | pico-splint star Modelliergel | Barattolo da 60 g          |
| 1820 2105 | pico-splint star Bonder       | Flacone da 5 ml            |
| 1820 2110 | pico-splint star Glanzlack    | Flacone da 10 ml           |
| 1820 2120 | pico-splint star Einmalpinsel | 100 pezzo blu metallizzato |



### picobello plus gel, azzurro cristallo

Resina fotopolimerizzante per modellazione

Una nuova generazione di resine fotopolimerizzanti da modellazione per applicazioni odontotecniche, in particolare per fresaggi e attacchi.

I modelli possono essere provati in bocca prima della fusione o del fresaggio.

L'elevata traslucenza di „picobello plus“ consente di controllare facilmente lo spessore dello strato, in particolare durante la modellazione e la lavorazione.

„picobello plus“ può essere applicato direttamente mediante l'ago dosatore.

| Cod.-Art. | Descrizione                                     | Confezione                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1820 0040 | picobello plus gel Set, azzurro cristallo       | 3 x 3 g picobello plus gel, azzurro cristallo in siringhe protette dalla luce, inclusi 12 aghi dosatori |
| 1820 0050 | picobello plus gel ricariche, azzurro cristallo | 5 x 3 g picobello plus gel, azzurro cristallo in siringhe protette dalla luce, inclusi 20 aghi dosatori |
| 1809 0012 | picobello plus gel, Dosierspitzen               | Ricarica con 50 aghi dosatori                                                                           |



### picobello gel

Resina da modellazione fotopolimerizzabile

precisione straordinaria, brucia senza residui; facile stratificazione con un alto grado di stabilità; fissaggio e bloccaggio localizzato anche in bocca – applicazione fluida con elevata stabilità. picobello gel e picobello form sono compatibili e possono pertanto essere utilizzati perfettamente in combinazione.

| Cod.-Art. | Descrizione                 | Confezione                                                                                |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1820 0010 | picobello gel Set           | 3 x 3 g picobello gel in siringhe protette dalla luce, inclusi 12 aghi dosatori           |
| 1820 0020 | picobello gel ricariche     | Ricariche 5 x 3 g picobello gel in siringhe protette dalla luce, inclusi 20 aghi dosatori |
| 1809 0012 | picobello gel Dosierspitzen | Ricarica con 50 aghi dosatori                                                             |



## picopreci plus

### Resina fotopolimerizzante di precisione

Per correzioni di precisione in resina, sigillatura di micro-fessure e altro ancora.

picopreci plus è una resina fotopolimerizzante in gel per modellazioni di precisione. Consente una lavorazione di alta precisione sia in caso di utilizzo sul modello nel laboratorio dentistico che direttamente nella bocca del paziente.

picopreci plus consente una rapida e precisa lavorazione con brevi tempi di polimerizzazione. Il materiale è caratterizzato dall'applicazione precisa direttamente dalla siringa mediante l'ago dosatore e dall'elevata stabilità, quindi da minori consumi, minore dispendio di tempo ed elevata precisione di posizionamento. picopreci plus non contiene MMA. Il „picopreci plus Bonder“ in dotazione consente l'incollaggio sicuro con resine PMMA.

picopreci plus disponibile nelle tonalità rosa, rosa opaco (34), colore del dente e ora anche trasparente.

### Proprietà e vantaggi:

- Elevata stabilità
- dosaggio molto ridotto
- ottime proprietà di modellazione

### Campi di applicazione:

- Riparazione, integrazione e correzione di mascherine tipo bite regolate
- Posizionamento e fissaggio di elementi funzionali su apparecchi ortodontici, dime radiografiche e chirurgiche
- Realizzazione di mascherine di fissaggio e per impianti
- Correzioni di precisione in resina (ad esempio papille)
- Conformazione di papille
- Riparazioni di provvisori
- Lavori di altissima precisione all'interno del cavo orale, ad esempio chiusura di canali per viti

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione                                                                                                        |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1820 0001 | picopreci plus Set | 3 x 3 g picopreci plus rosa in siringhe protette dalla luce inclusi 12 aghi dosatori e 5 ml picopreci plus Bonder |

| Cod.-Art. | Descrizione                  | Confezione                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1820 0002 | picopreci plus Set           | 3 x 3 g picopreci plus rosa opaco (34) in siringhe protette dalla luce inclusi 12 aghi dosatori e 5 ml picopreci plus Bonder |
| 1820 0006 | picopreci plus Set           | 3 x 3 g picopreci plus dentina in siringhe protette dalla luce inclusi 12 aghi dosatori e 5 ml picopreci plus Bonder         |
| 1820 0007 | picopreci plus Set           | 3 x 3 g picopreci plus trasparente in siringhe protette dalla luce inclusi 12 aghi dosatori e 5 ml picopreci plus Bonder     |
| 1820 0008 | picopreci plus Ricarica      | Ricarica: 5 x 3 g picopreci plus rosa in siringhe dalla luce inclusi 20 aghi dosatori                                        |
| 1820 0009 | picopreci plus Ricarica      | Ricarica: 5 x 3 g picopreci plus trasparente in siringhe protette dalla luce inclusi 20 aghi dosatori                        |
| 1820 0005 | picopreci plus Bonder        | Flacone da 5 ml                                                                                                              |
| 1809 0012 | picopreci plus Dosierspitzen | Ricarica con 50 aghi dosatori                                                                                                |



### picobello form

resina da modellazione fotopolimerizzabile

picobello è un materiale di modellatura in resina fotopolimerizzante per la realizzazione di attacchi su misura, interventi telescopici e conici, sovrastrutture, strutture di impianti e tanti altri interventi

picobello è disponibile in gel e oggi anche come materiale modellante (picobello form) per interventi rapidi che richiedono una maggiore applicazione di materiale, ad esempio per la realizzazione di chiavi di fissaggio e di trasmissione

Durante l'applicazione con la siringa o la modellazione manuale si ottiene sempre la giusta consistenza per qualsiasi campo di applicazione.  
picobello gel e picobello form sono compatibili e possono pertanto essere utilizzati perfettamente in combinazione.

| Cod.-Art. | Descrizione    | Confezione        |
|-----------|----------------|-------------------|
| 1820 0025 | picobello form | Scatolina da 25 g |



### picobloc

Resina per bloccaggio fotopolimerizzabile

picobloc gel: Materiale fotopolimerizzabile per imbutitura di dighe per trattamento sbiancante.

| Cod.-Art  | Descrizione              | Confezione                                                    |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1809 0003 | picobloc gel rot (rosso) | 3 x 3 g siringhe protette dalla luce inclusi 12 aghi dosatori |
| 1809 0012 | picobloc Dosierspitzen   | Ricarica con 50 aghi dosatori                                 |



### pico-light LED

Lampada polimerizzante LED

Fotopolimerizzatore ad alte prestazioni e d'alta gamma per l'indurimento di materiali fotopolimerizzabili di precisione in laboratorio.

- Indurimento perfetto in pochi secondi
- Compatibilità con tutti i materiali fotopolimerizzabili di precisione picodent
- Maneggevolezza
- Altissime prestazioni
- Può essere utilizzato continuamente per 3 ore

| Cod.-Art  | Descrizione                           | Confezione                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1821 0000 | pico-light LED                        | 1 pico-light LED con tubo conduttore di luce, 1 batteria agli ioni di litio, 1 caricabatteria con cavo, 1 protezione antiriflesso, 1 paio di occhiali protettivi LED, 1 LED-Ständer (Acryl) |
| 1821 0052 | Conduttore di luce per pico-light LED | 1 pezzo                                                                                                                                                                                     |
| 1821 0053 | Batteria agli ioni di litio           | 1 pezzo                                                                                                                                                                                     |
| 1821 0054 | Caricabatteria per pico-light LED     | 1 pezzo                                                                                                                                                                                     |
| 1821 0055 | Occhiali protettivi LED               | 1 pezzo                                                                                                                                                                                     |
| 1821 0056 | Protezione antiriflesso               | 1 pezzo                                                                                                                                                                                     |
| 1821 0010 | LED-Halter (Metal)                    | 1 pezzo, supporto del metallo                                                                                                                                                               |
| 1821 0020 | LED-Ständer (Acryl)                   | 1 pezzo, supporto acrilico                                                                                                                                                                  |



### pico-tray

Materiale fotopolimerizzabile per portaimpronte individuali

Per la produzione di portaimpronta individuali e valli occlusali.

Adatto per arcata superiore ed inferiore. Disponibile in 3 diversi colori.

| Cod.-Art. | Descrizione | Colore | Confezione |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 1810 0001 | pico-tray   | rosa   | 50 pezzi   |
| 1810 0002 | pico-tray   | blu    | 50 pezzi   |
| 1810 0003 | pico-tray   | bianco | 50 pezzi   |



### picodent® twinduo

Silicone per mascherine per addizione A + B

Uso semplice, senza catalizzatore, resistente all'ebollizione, tempo di presa rapido, lavorazione economica (dosaggio economico).

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1        |
| Durezza shore A:          | 90         |
| Tempo di miscelazione:    | 30 secondi |
| Tempo di lavorazione:     | 90 secondi |
| Tempo di presa:           | 6-7 minuti |

| Cod.-Art. | Descrizione                          | Confezione           |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 1302 0003 | picodent® twinduo, turchese / grigio | 2 x 1,5 kg lattina   |
| 1302 0005 | picodent® twinduo, turchese / grigio | Bidone da 2 x 2,5 kg |



### picodent® twinduo soft

Silicone per mascherine per addizione A + B

Accuratezza estrema, superfici estremamente lisce, flessibile, resistente all'ebollizione e alle microonde.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1           |
| Durezza shore A:          | 85            |
| Tempo di miscelazione:    | 30 secondi    |
| Tempo di lavorazione:     | 75-90 secondi |
| Tempo di presa:           | 4-5 minuti    |

| Cod.-Art. | Descrizione                          | Confezione           |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 1302 3020 | picodent® twinduo soft, blu / grigio | 2 x 1,5 kg lattina   |
| 1302 3000 | picodent® twinduo soft, blu / grigio | Bidone da 2 x 2,5 kg |



### picodent® twinduo extrahart

Silicone per mascherine per addizione A + B

Extra duro, durezza shore 99, tempo di presa rapido, resistente all'ebollizione e alle microonde.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1        |
| Durezza shore A:          | 99         |
| Tempo di miscelazione:    | 30 secondi |
| Tempo di lavorazione:     | 90 secondi |
| Tempo di presa:           | 5-6 minuti |

| Cod.-Art. | Descrizione                                    | Confezione         |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1302 1003 | picodent® twinduo extrahart, turchese / grigio | 2 x 1,5 kg lattina |
| 1302 1010 | picodent® twinduo extrahart, turchese / grigio | Bidone da 2 x 5 kg |



## picodent twingum®

Silicone extra duro per mascherine

Modellabile, con elevata durezza finale e accurata riproduzione dei dettagli. Non è sensibile alla temperatura.

Rapporto di miscelazione: 1 misurino di silicone per mascherine 2,5 cm di catalizzatore

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Durezza shore A:       | 85            |
| Tempo di miscelazione: | 30-40 secondi |
| Tempo di lavorazione:  | 2 minuti      |
| Tempo di presa:        | 6-7 minuti    |

| Cod.-Art. | Descrizione                  | Confezione       |
|-----------|------------------------------|------------------|
| 1303 1601 | picodent twingum®, turchese  | 1,6 kg lattina   |
| 1303 0001 | picodent twingum®, turchese  | Bidone da 10 kg  |
| 1303 1600 | picodent twingum®, blu royal | 1,6 kg lattina   |
| 1303 0000 | picodent twingum®, blu royal | Bidone da 10 kg  |
| 1303 0060 | picodent® pastenhärter       | Tubetto da 60 ml |



## pico-twister

La macchina pico-twister è un miscelatore e dosatore per tutti i siliconi per duplicazione nella proporzione 1:1

La macchina trasporta, dosa e miscela i siliconi in modo pienamente automatico e se si preme un pulsante mette a disposizione la quantità esatta di materiale desiderato.

| Cod.-Art. | Descrizione                                                           | Confezione |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1349 5050 | pico-twister con 2 adattori per bottiglie e 5 cannule di miscelazione | 1 pezzo    |
| 1349 5051 | pico-twister serbatoi per materiale                                   | 2 pezzi    |
| 1349 5052 | pico-twister tubi di collagamento                                     | 2 pezzi    |
| 1349 5053 | pico-twister struttura di appoggio per taniche da 5 kg                | 1 pezzo    |
| 1349 5100 | pico-twister cannule di miscelazione                                  | 100 pezzi  |



## eco-sil

Silicone per addizione per la duplicazione per l'odontoiatria

Bassa viscosità, con ottime proprietà meccaniche

Rapporto di miscelazione: 1:1

Tempo di lavorazione 23°: 6-7 minuti

Sfilabile dopo: 25 minuti

Durezza shore A: 22

| Cod.-Art. | Descrizione                                  | Colore         | Confezione          |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1300 6100 | eco-sil                                      | bianco / lilla | Flacone da 2 x 1 kg |
| 1300 6500 | eco-sil                                      | bianco / lilla | Tanica da 2 x 5 kg  |
| 1349 0001 | Pompa dosatrice di alta qualità per canestri | bianco         | 1 pezzo             |



### eco-sil speed

Silicone per addizione per la duplicazione per l'odontoiatria

Bassa viscosità et presa rapida, con ottime proprietà meccaniche.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1        |
| Tempo di lavorazione 23°: | 3-4 minuti |
| Sfilabile dopo:           | 12 minuti  |
| Durezza shore A:          | 22         |

| Cod.-Art. | Descrizione                                  | Colore         | Confezione          |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1300 7100 | eco-sil speed                                | bianco / lilla | Flacone da 2 x 1 kg |
| 1300 7500 | eco-sil speed                                | bianco / lilla | Tanica da 2 x 5 kg  |
| 1349 0001 | Pompa dosatrice di alta qualità per canestri | bianco         | 1 pezzo             |



### eco-sil soft

Silicone da duplicazione per addizione

Estremamente fluido, morbido ed elastico per modelli con monconi sottili dotati di sotto squadra, privo di sedimenti.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1       |
| Tempo di lavorazione 23°: | 5 minuti  |
| Sfilabile dopo:           | 30 minuti |
| Durezza shore A:          | 18        |

| Cod.-Art. | Descrizione                                  | Colore         | Confezione          |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1300 8100 | eco-sil soft                                 | bianco / verde | Flacone da 2 x 1 kg |
| 1300 8500 | eco-sil soft                                 | bianco / verde | Tanica da 2 x 5 kg  |
| 1349 0001 | Pompa dosatrice di alta qualità per canestri | bianco         | 1 pezzo             |



### eco-sil extrahart

Silicone da duplicazione per addizione

Molto fluido, elevata durezza shore, elevata resistenza allo strappo, ben leggibile.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1        |
| Tempo di lavorazione 23°: | 5-6 minuti |
| Sfilabile dopo:           | 30 minuti  |
| Durezza shore A:          | 32         |

| Cod.-Art. | Descrizione                                  | Colore         | Confezione          |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1300 9100 | eco-sil extrahart                            | bianco / verde | Flacone da 2 x 1 kg |
| 1300 9500 | eco-sil extrahart                            | bianco / verde | Tanica da 2 x 5 kg  |
| 1349 0001 | Pompa dosatrice di alta qualità per canestri | bianco         | 1 pezzo             |



## picodent® esthetic-gum

Silicone A trasparente

Per la fabbricazione di mascherine trasparenti per la lavorazione di materiali fotopolimerizzabili.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rapporto di miscelazione: | 1:1        |
| Durezza shore A:          | 75         |
| Tempo di lavorazione:     | 60 secondi |
| Tempo di presa:           | 2-3 minuti |

| Cod.-Art. | Descrizione                             | Confezione                                                     |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1306 1250 | picodent® esthetic-gum                  | Kit con 2 x 50 ml doppie cartucce e 12 cannule da miscelazione |
| 1306 8050 | picodent® esthetic-gum Doppelkartuschen | Ricarica: 8 x 50 ml doppie cartucce                            |
| 1306 0040 | picodent® esthetic-gum Mischkanülen     | Ricarica con 40 cannule da miscelazione                        |



### pico-edelkorund

lucidante per protesi scheletrate e leghe per ceramica

- 99,8 % minimo di allumina
- privo di acciaio e quarzo
- alto grado di durezza, rimane affilato (elimina rapidamente il materiale di rivestimento)
- non pericoloso per la salute (nessun pericolo di silicosi)

| Cod.-Art. | Descrizione                | Confezione                                |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1250 5005 | pico-edelkorund, 50 $\mu$  | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 5020 | pico-edelkorund, 50 $\mu$  | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |
| 1250 1105 | pico-edelkorund, 110 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 1120 | pico-edelkorund, 110 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |
| 1250 2505 | pico-edelkorund, 250 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 2520 | pico-edelkorund, 250 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |

### pico-glanzstrahlperlen

Per la pulizia e la levigatura delle leghe di metalli preziosi

- ossido di silicio, ultrafine
- crea lucentezza sferica uniforme
- delicato sulle superfici sensibili
- compatta le superfici metalliche

| Cod.-Art. | Descrizione                       | Confezione                                |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1250 0505 | pico-glanzstrahlperlen, 50 $\mu$  | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 0520 | pico-glanzstrahlperlen, 50 $\mu$  | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |
| 1250 1205 | pico-glanzstrahlperlen, 125 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 1220 | pico-glanzstrahlperlen, 125 $\mu$ | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |

### pico-bimssteinpulver

Per la levigatura e il trattamento delle protesi in resina

- asettico e privo di quarzo
- non irritante per la pelle, inodore
- non pericoloso per la salute (nessun pericolo di silicosi)

| Cod.-Art. | Descrizione                                                    | Confezione                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1250 0205 | pico-bimssteinpulver, feine Körnung (granulometria fine)       | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 0220 | pico-bimssteinpulver, feine Körnung (granulometria fine)       | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |
| 1250 0005 | pico-bimssteinpulver, mittlere Körnung (grana media)           | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 0020 | pico-bimssteinpulver, mittlere Körnung (grana media)           | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |
| 1250 0105 | pico-bimssteinpulver, grobe Körnung (granulometria grossolana) | Sacchetto di dosaggio da 5 kg             |
| 1250 0120 | pico-bimssteinpulver, grobe Körnung (granulometria grossolana) | Sacchetto di dosaggio da 4 x 5 kg (20 kg) |



## pico-strahlresin

Con pico-strahlresin si adotta una tecnica di lucidatura analoga a quella con polvere di pietra pomice

- Esclusiva struttura cristallina
- Delicata, ma estremamente abrasiva
- Levigante, durata maggiore (30 %)
- Elimina i batteri, è inodore

| Cod.-Art. | Descrizione      | Confezione                        |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 1250 3002 | pico-strahlresin | Sacchetto di dosaggio da 2 kg     |
| 1250 3008 | pico-strahlresin | Sacchetto di dosaggio da 4 x 2 kg |
| 1250 3010 | pico-strahlresin | Cartone da 10 kg                  |




## pico-bimsclean

Liquido di miscelazione pronto all'uso per polvere di pietra pomice e pico-strahlresin

- Elevata azione battericida e fungicida
- Previene efficacemente i cattivi odori
- Rallenta in modo duraturo il seccamento del mezzo levigante
- Ottima compatibilità con i materiali

| Cod.-Art. | Descrizione    | Confezione          |
|-----------|----------------|---------------------|
| 1250 4001 | pico-bimsclean | Flacone da 1.000 ml |
| 1250 4005 | pico-bimsclean | Tanica da 5.000 ml  |

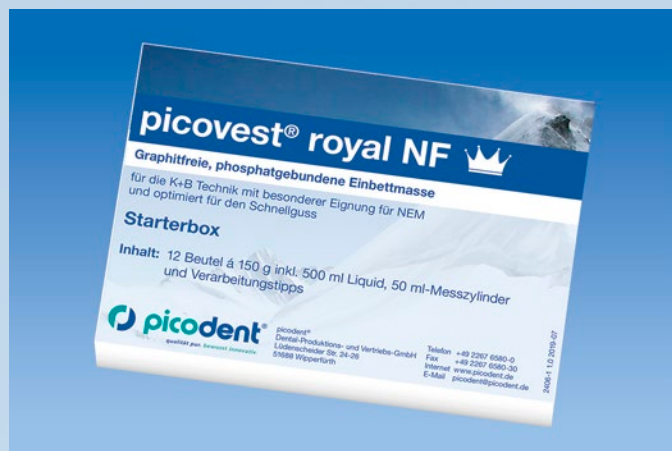


### picovest® royal NF

Rivestimento fosfatico privo di grafite per la tecnica di corone e ponti.

Particolarmente indicato per metalli non nobili e ottimizzato per il procedimento a fusione rapida

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 g polvere: | 24 ml liquido |
| Rapporto di miscelazione su 150 g polvere: | 36 ml liquido |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:         | 60 secondi    |
| Tempo di lavorazione:                      | ca. 5 minuti  |
| Espansione di presa:                       | ca. 2,9 %     |

| Cod.-Art. | Descrizione                   | Confezione                                                     |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1206 1500 | picovest® royal NF Starterbox | 12 buste da 150 g<br>500 ml liquido<br>50 ml-cilindro graduato |
| 1206 3015 | picovest® royal NF            | 30 buste da 150 g                                              |
| 1206 1010 | picovest® royal NF Liquid     | Flacone da 1.000 ml                                            |

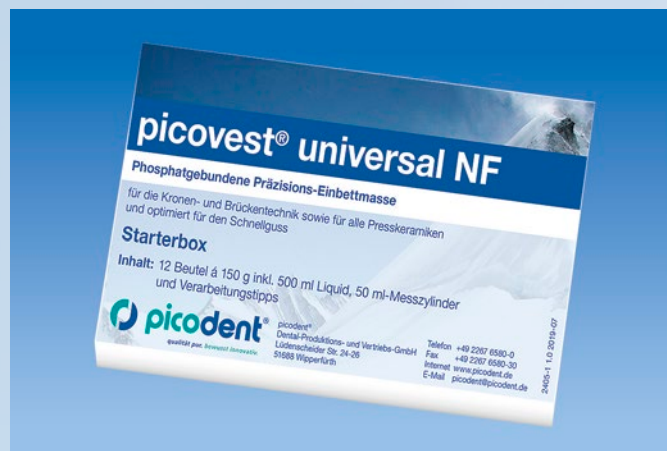

### picovest® universal NF

Rivestimento fosfatico di precisione per la tecnica di corone e ponti.

Nonché per tutte le pressoceramiche, e ottimizzato per il procedimento a fusione rapida.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 g di polvere: | 25 ml liquido |
| Rapporto di miscelazione su 150 g di polvere: | 38 ml liquido |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:            | 60 secondi    |
| Tempo di lavorazione:                         | ca. 5 minuti  |
| Espansione di presa:                          | ca. 2,0 %     |

| Cod.-Art. | Descrizione                                                         | Confezione                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1205 1500 | picovest® universal NF Starterbox                                   | 12 buste da 150 g<br>500 ml liquido<br>50 ml-cilindro graduato |
| 1205 0025 | picovest® universal NF                                              | Buste da 5 kg                                                  |
| 1205 2550 | picovest® universal NF                                              | 25 buste da 150 g                                              |
| 1205 5015 | picovest® universal NF                                              | 50 buste da 150 g                                              |
| 1205 1010 | picovest® universal NF Liquid (liquido)                             | Flacone da 1.000 ml                                            |
| 1205 1020 | Spezial-Liquid für picovest® universal NF (liquido speciale - rosa) | Flacone da 1.000 ml                                            |




### picocast® speed NF

Rivestimento per scheletrati ottimizzato per la fusione rapida.

Speciale per la lavorazione di protesi combinate (attacchi di precisione, scheletrati telescopiche, fresaggi ecc.). Ottimizzato per la fusione rapida.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 g di polvere: | 20 ml liquido |
| Rapporto di miscelazione su 400 g di polvere: | 80 ml liquido |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:            | 60 secondi    |
| Tempo di lavorazione:                         | ca. 5 minuti  |
| Espansione di presa:                          | ca. 0,8 %     |

| Cod.-Art. | Descrizione                  | Confezione                                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1212 1500 | picocast speed NF Starterbox | 12 buste da 200 g<br>500 ml liquido<br>50 ml-cilindro graduato |
| 1212 0450 | picocast speed NF            | Buste da 4,5 kg                                                |
| 1212 1845 | picocast speed NF            | 4 buste da 4,5 kg                                              |
| 1212 5040 | picocast speed NF            | 50 buste da 400 g                                              |
| 1212 1200 | picocast speed NF            | 100 buste da 200 g                                             |
| 1212 1010 | picocast speed NF liquid     | Flacone da 1.000 ml                                            |

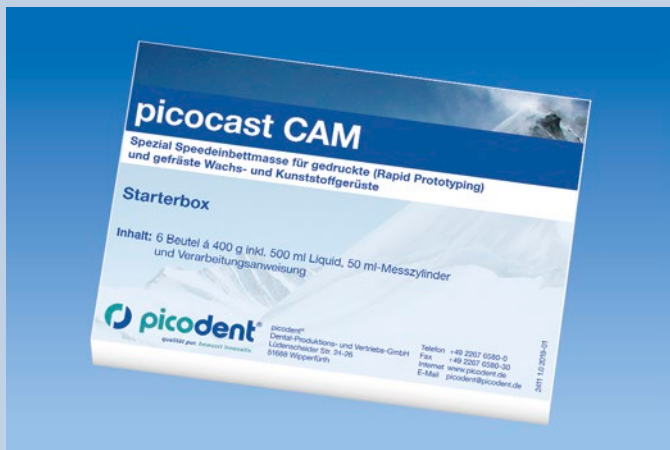

## picocast CAM

Speciale materiale di rivestimento speed per scheletrati in cera e resina stampati (Rapid Prototyping) e fresati E' indicato per la fusione veloce e permette la fusione di tutte le leghe dentali (ad eccezione del titanio).

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 g di polvere: | 20 ml Liquid |
| Rapporto di miscelazione su 400 g di polvere: | 80 ml Liquid |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:            | 60 secondi   |
| Tempo di lavorazione:                         | ca. 5 minuti |
| Max. espansione di presa:                     | ca. 3%       |

| Cod.-Art. | Descrizione             | Confezione                                                    |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1211 6400 | picocast CAM Starterbox | 6 buste da 400 g<br>500 ml liquido<br>50 ml-cilindro graduato |
| 1211 5040 | picocast CAM            | 50 buste da 400 g                                             |
| 1211 1000 | picocast CAM Liquid     | Flacone da 1.000 ml                                           |



## pico-pattern

Resina per modellazione universale autoindurente

- Modellazione di corone telescopiche e coniche
- Realizzazione di monconi in resina
- Modellazione di attacchi individuali e barre
- Fissaggio e bloccaggi ad es. di modelli per saldatura

- Modellazione di inlay, onlay, ritenzioni e ganci
- Modellazione di sovrastrutture

| Cod.-Art. | Descrizione                | Confezione                                                                                   |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1825 0002 | pico-pattern Set, rosso    | 100 g polvere rosso<br>100 ml liquido<br>1 x pico-pattern pennello<br>2 x misurino da 5 ml   |
| 1825 0003 | pico-pattern Set, dentina  | 100 g polvere dentina<br>100 ml liquido<br>1 x pico-pattern pennello<br>2 x misurino da 5 ml |
| 1825 0001 | pico-pattern Metallständer | 1 pezzo                                                                                      |
| 1825 0005 | Silikonanmischbecher       | 2 pezzo á 5 ml                                                                               |
| 1825 0006 | pico-pattern-Pinsel        | 10 pezzo                                                                                     |

| Cod.-Art. | Descrizione                  | Confezione        |
|-----------|------------------------------|-------------------|
| 1825 0010 | pico-pattern Pulver, rosso   | Flacone da 100 g  |
| 1825 0050 | pico-pattern Pulver, rosso   | Flacone da 500 g  |
| 1825 0020 | pico-pattern Pulver, dentina | Flacone da 100 g  |
| 1825 0060 | pico-pattern Pulver, dentina | Flacone da 500 g  |
| 1825 0100 | pico-pattern Liquid          | Flacone da 100 ml |
| 1825 0250 | pico-pattern Liquid          | Flacone da 250 ml |



### picodent® easysoft

Rivestimento gessoso  
Speciale per forno freddo e caldo

Il rivestimento speciale per tutte le leghe ad alto contenuto di oro. Con Easysoft si ottiene una calzata perfetta, indipendentemente se il cilindro con il liner viene inserito in forno freddo o preriscaldato.

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rapporto di miscelazione su 100 g di polvere: | 32-37 ml acqua distillata                     |
| Rapporto di miscelazione su 130 g di polvere: | 42-48 ml acqua distillata                     |
| Tempo di miscelazione sotto vuoto:            | 60 secondi                                    |
| Tempo di lavorazione:                         | ca. 7 minuti                                  |
| Tempo di presa:                               | ca. 60 minuti                                 |
| Espansione di presa:                          | 0,4-0,8 % in base al rapporto di miscelazione |
| Espansione termica:                           | 1,2 %                                         |

| Cod.-Art. | Descrizione        | Confezione      |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 1200 0006 | picodent® easysoft | Cartone da 6 kg |



### picodent® easyvlies

Liner speciale privo di amianto per il rivestimento interno dei cilindri.

| Cod.-Art. | Descrizione         | Confezione                    |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 1203 0055 | picodent® easyvlies | Rotolo<br>55 mm x 1 mm x 25 m |



### picodent® „Speed-Muffel“

Risparmiare con metodo

Cilindri per espansione libera. Espansione tridimensionale. Calzata perfetta.

| Cod.-Art. | Descrizione                        |
|-----------|------------------------------------|
| 1203 0002 | picodent® „Speed-Muffel“ - Größe 2 |
| 1203 0003 | picodent® „Speed-Muffel“ - Größe 3 |
| 1203 0006 | picodent® „Speed-Muffel“ - Größe 6 |

## Service

Laboratorio Odontotecnico Marosi Gianluigi  
Via Rovero 8 / A  
38062 Arco (TN)

Telefono 0464-514693  
Cellulare 335-8095412  
Internet [www.laboratoriomarosi.it](http://www.laboratoriomarosi.it)  
E-Mail [picodentitalia@gmail.com](mailto:picodentitalia@gmail.com)



picodent®  
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH  
Lüdenscheider Str. 24-26  
51688 Wipperfürth

Telefono +49 2267 6580-0  
Fax +49 2267 6580-30  
Internet [www.picodent.de](http://www.picodent.de)  
E-Mail [export@picodent.de](mailto:export@picodent.de)

